

medi



Инструкция по применению  
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3



4



5

# medi Shoulder sling

## Назначение

Отводящая шина medi Shoulder sling может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения шины в качестве раневого покрытия.

---

## Показания

Послеоперационное лечение и иммобилизация плечевого сустава

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

## Инструкция по пользованию

- Инструкция по пользованию
- Откройте все застежки-липучки.
- Вложите руку травмированного плеча в повязку (рис. 1).
- Обмотайте оба плечевых ремня крест-накрест вокруг верхней части тела и положите их концы на плечо (рис. 2).
- Возьмите конец одного ремня и прикрепите его к повязке (рис. 3).
- Прикрепите к повязке конец второго ремня.
- При необходимости для улучшения фиксации (особенно в ночное время) можно дополнительно наложить широкий ремень. Прикрепите его сзади (на локте) к повязке и наложите его на живот, а затем на спину. При этом рука должна двигаться свободно (рис. 5).

## Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.

- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



### **Указания по хранению**

Пожалуйста, храните бандаж в сухом месте, предотвращая попадание прямых солнечных лучей.

### **Материалы**

полиамид.

### **Ответственность**

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

### **Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### **Компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!