

medi

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3



4



5



6



7



8




9



10



11

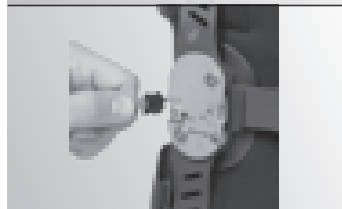

12

medi PT control

Назначение

Ортез medi PT control следует использовать для лечения травм и заболеваний, связанных со смещением надколенника. При наличии заболеваний и повреждений кожи в области наложения ортеза изделие не должно непосредственно контактировать с проблемными участками кожи в качестве раневого покрытия.

Показания

- Консервативное или оперативное лечение вывихов надколенника на фоне незначительной или умеренной нестабильности коленного сустава
- Латерализация надколенника на фоне незначительной или умеренной нестабильности коленного сустава
- Реабилитация после латерального релиза
- Хондропластика надколенника

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Установка диапазонов сгибания/ разгибания

Вкладыш для ограничения разгибания, EXT: 0°, 10°, 20°, 30°

Вкладыш для ограничения сгибания, FLEX: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Возможна иммобилизация под углами: 0°, 10°, 20°, 30°

Для иммобилизации ортеза сначала установите вкладыши для ограничения разгибания, а затем аналогичные вкладыши для ограничения сгибания. Углы иммобилизации на обоих шарнирах ортеза должны одинаковыми.

1. Изначально в шарниры установлены следующие вкладыши: 0° для ограничения разгибания.
2. Чтобы заменить вкладыши, удалите декоративную накладку, потянув ее задний край в сторону от ортеза.
3. Для извлечения вставок воспользуйтесь пинцетом, расположенном на внутренней поверхности декоративной накладки. Захватите вкладыш за край и вытащите его из пазов (рис. 12). Вставьте новые вкладыши (сначала для ограничения разгибания) таким образом, чтобы расположение меток „UP“ на шарнире и вкладыше совпадало. Щелчок свидетельствует о правильной установке вкладыша.
4. Несколько раз согните и разогните ортез, чтобы убедиться, что вкладыши установлены верно. Закрепите пинцет на внутренней поверхности декоративной накладки (должен раздаться щелчок). Установите на место декоративные вставки: расположите их таким образом, чтобы стержни с шарообразным концом располагались напротив специальных корзинок, и надавите на накладку. Характерный щелчок свидетельствует о том, что накладка закреплена.

Важная информация

Диапазон сгибания и разгибания можно изменять только по рекомендации врача. Для профилактики чрезмерного разгибания коленного сустава всегда вставляйте вкладыши 0° для ограничения разгибания. Ограничительные вставки четко регулируют амплитуду движения ортеза. Однако, из-за наличия мягких тканей реальная амплитуда движения коленного сустава может отличаться от

заданной. В этом случае нужно заменить вставки с учетом состояния мягких тканей вокруг сустава. Кроме того, если пациент не может согнуть/разогнуть ногу в ортезе до заданного угла, проверьте положение шарниров: их центры должны располагаться на боковой срединной линии на уровне верхнего полюса надколенника.

Инструкция по надеванию

- Расстегните все ремни и зафиксируйте липучки на поверхности соответствующих ремней, чтобы они не цеплялись друг к другу.
- Согните колено под углом 30° и натяните ортез на ногу (рис. 1).
- Расположите ортез на ноге таким образом, чтобы центры шарниров располагались на боковых срединных линиях на уровне верхнего края надколенника (рис. 2).
- Затяните ремни в следующей последовательности:
 - задний ремень на голени (рис. 3);
 - задний нижний ремень на бедре (рис. 4);
 - верхний ремень С-образной подушки (рис. 5);
 - нижний ремень С-образной подушки (рис. 6) и убедитесь, что С-образная подушка находится сбоку от надколенника и не давит на его переднюю поверхность;
 - задний верхний ремень на бедре (рис. 7);
 - передний ремень на бедре (рис. 8);
 - передний ремень на голени (рис. 9).
- Если это возможно, несколько раз согните ногу в коленном суставе. Если ортез смещается или его фиксация на ноге ослабла, поправьте ортез (рис. 10) и затяните

ремни еще раз в порядке, описанном выше.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой извлеките шарниры из мягкой манжеты. Стирайте нейтральным моющим средством вручную при температуре воды 30°. Липучки во время стирки должны быть застегнуты. Тщательно прополощите поскольку остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствуют ускоренному износу материала. Сушите в расправленном виде вдали от нагревательных приборов.

- Не отбеливать.
- Не отжимать.
- Не сушить в сушильной машине.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Материалы

Авиональ, полиамид, эластан, полиуретан.

Гарантия

Согласно законодательству, действующему на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!