


medi

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

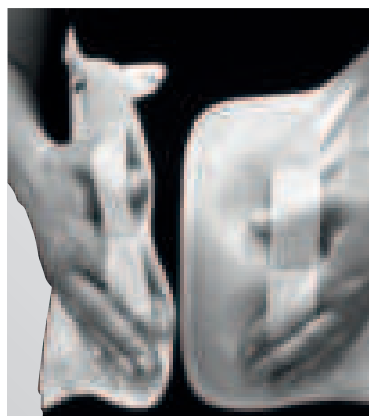

1



2



3



4



5



6

protect. Dorsofix

Назначение

протест.Dorsofix - корсет. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения спины; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- острый и хронический болевой синдром в поясничной области
- лечение переломов позвонков
- поясничная радикулопатия
- грыжа межпозвоночного диска
- остеохондроз
- легкий спондилолистез
- после дискэктомии

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Рекомендации по применению

- наденьте корсет при помощи двух петель и застегните переднюю застежку (Рис.1)
- снимите защитное покрытие с лент Велкро, прикрепленных к нижним эластичным петлям, и застегните их на застежку Велкро спереди (Рис.2)
- снимите защитное покрытие с лент Велкро, прикрепленных к верхним эластичным петлям, и застегните их на застежку Велкро спереди (Рис.3)
- возьмите плечевые ленты, протяните их через подмышечные впадины назад, перекрестите и проденьте через вертикальную петлю, пристегните к передней застежке корсета (Рис.4)
- в качестве альтернативы вы можете использовать вертикальную ленту и

регулировать давление, оказываемое на спину. Протяните плечевые ремни от плечей через подмышечные впадины назад. Затем проденьте ремни через пряжку на горизонтальной ленте, переверните петли Велкро на концах лент и прикрепите их к застежке спереди (Рис 5/6).

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Рекомендации по хранению

Пожалуйста, храните изделие в сухом, прохладном месте, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

Материалы

хлопок, лайкра

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.