

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать
онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1




5



2




6

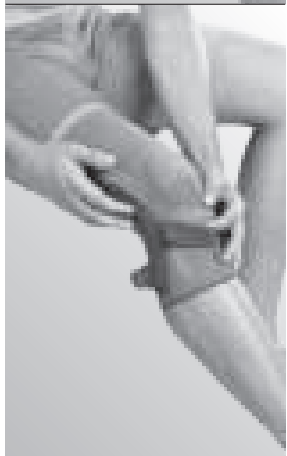

3



7

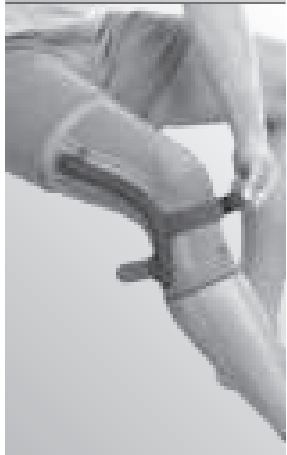

4

Genumedi® PSS

Назначение

Genumedi PSS — это коленный бандаж для снятия нагрузки с патellarного сухожилия в месте его прикрепления. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения колена; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

Области применения

- Пателлярный тендинит («колени прыгуна»)
- Болезнь Осгуда-Шляттера
- Пателлофemorальный болевой синдром
- Хондропатия надколенника
- Хондромалиция надколенника
- После повреждения пателлярного сухожилия
- Ретропателлярный артроз
- Неправильная траектория движения надколенника
- Синдром медиопателлярной складки

Побочные действия и противопоказания

Побочные действия на весь организм в настоящее время неизвестны. Однако при слишком плотном прилегании вспомогательного средства, например бандажа, в отдельных случаях возможно появление следов от сдавливания, симптомов сужения кровеносных сосудов и сжатия нервов. В связи с этим обязательно консультируйтесь со своим лечащим врачом при следующих обстоятельствах:

- заболевания или повреждения кожи в области применения, прежде всего, признаки раздражения (сильный нагрев, опухание или покраснение);
- нарушения чувствительности и кровообращения ног и стоп (например, при диабете);
- нарушения лимфооттока, а также невыраженное опухание мягких тканей за пределами области применения.

Сочетание с другими изделиями, например компрессионными чулками до колен, может быть более эффективным, однако это следует обсудить с лечащим врачом.

Принцип действия

Силиконовые подушечки, интегрированные в бандаж Genumedi PSS, снимают нагрузку с надколенника и в сочетании с компрессионной тканью создают эффект массажа. Благодаря этому эффекту происходит стимуляция кровообращения в суставе, при этом припухлость и выпоты проходят, а раздражение и боль становятся слабее. В то же время улучшаются возможности контроля коленного сустава с помощью мышц и происходит его стабилизация собственными силами организма. Давление дополнительного ремешка с находящейся под ним подушечкой ослабляет усилие растяжения пателлярного сухожилия, снимает с него нагрузку в месте крепления и ослабляет боль.

Максимальный лечебный эффект бандажа проявляется при физических нагрузках. Бандаж можно носить, в течение всего дня, не снимая. При этом сложно сгибать колено, более чем на 70° в положении сидя. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача.

Бандаж можно использовать, находясь в воде, после чего его следует тщательно прополоскать в чистой воде и высушить на воздухе.

Надевание и снятие

- Расстегните оба ремешка.
- Возьмитесь за бандаж большими пальцами изнутри у верхнего конца боковых стабилизирующих стержней (рис. 1).
- Натяните бандаж на колено так, чтобы обе силиконовые подушечки охватывали надколенник по центру и не давили на него. Убедитесь, что маленькая подушечка (для снятия нагрузки с сухожилия) под надколенником находится над пателлярным сухожилием (рис. 2 + 3).
- Теперь согните ногу под небольшим углом и застегните передний ремешок. Убедитесь, что этот ремешок проходит над маленькой подушечкой (рис. 4).
- Затем застегните задний ремешок (рис. 5).
- Если ремешок не подходит по длине, его можно подрезать. Для этого расстегните липучки на концах ремешка и обрежьте ремешок до нужной длины (рис. 6).
- В заключение еще раз убедитесь, что бандаж надет правильно.
- Для снятия бандажа сначала расстегните оба ремешка. Затем вставьте пальцы под нижний конец бандажа и стяните его по направлению вниз (рис. 7).

Обратите внимание: первый раз надевать изделие следует под наблюдением квалифицированного специалиста, который прошел соответствующее обучение.

Рекомендации по уходу

Можно не вытаскивать силиконовое кольцо перед стиркой. Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Ополаскиватели, жиры, масла, лосьоны, мази и остатки мыла могут оказывать агрессивное влияние на материал, нарушить эффект Clima Comfort и привести к раздражению кожи.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Не сушить в сушильной машине.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.

**Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Предохранять от воздействия прямого солнечного света.

Материалы

полиамид, полиэстер, эластан

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Важные замечания

Изделие предназначено только для индивидуального использования. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача. Не носите изделие при наличии открытых ран. Применяйте изделие только согласно рекомендации Вашего врача.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!