



Опоры-ходунки
10180, 10184HR, Quick, 10185-BA, 10188,
10189, 10180-W, 10180-3W

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	4
1.3 Упаковка.....	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	6
2.1 Важные предупреждения.....	5
2.2 Порядок работы.....	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	7
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	9

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков 10180, 10184HR, Quick, 10185-BA, 10188, 10189, 10180-W, 10180-3W.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Опоры-ходунки 10180, 10184HR, Quick (XXL), 10185-BA, 10188, 10189, 10180-W, 10180-3W предназначены для облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации движения.



10180



10184HR



Quick (XXL)



10185-BA



10188



10189



10180-W




10180-3W

1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
механизм	складной	все модели
материал	алюминий	все модели
конструкция	“без шага”	10180, 10184HR, 10185-BA, Quick(XXL), 10180-W, 10180-3W
	“с шагом”	10188, 10189
фиксирующий замок	одинарный	10180, 10188, 10184HR, 10189, 10180-W, 10180-3W
	двойной	10185-BA, Quick(XXL)
особенность	двухуровневые	10184HR
	усиленный корпус	10185-BA, Quick(XXL)
	с подмышечными опорами	10189
	на колесах	10180-W, 10180-3W, Quick(XXL)
производство	Тайвань (Китай)	все модели
гарантия	6 мес.	все модели

1.3 Упаковка

В комплектации: ходунки,
руководство по эксплуатации.

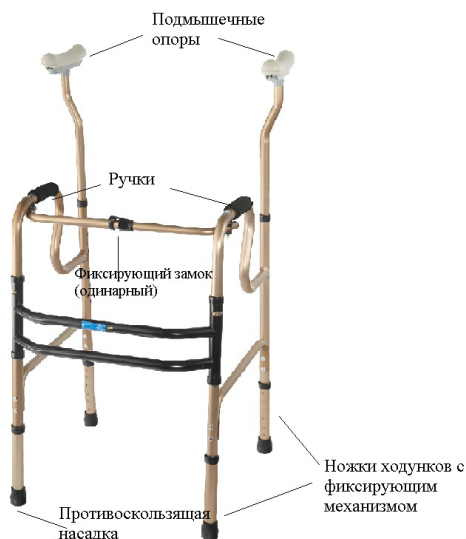

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на 10179 - 100 кг; на 10184HR, 10180, 10180-W, 10180-3W - 136 кг; на 10188, 10189 - 120 кг; на 10185-BA, Quick (XXL) - 225 кг.

2.2 Порядок работы

Ходунки продаются в собранном виде.

1. Вытащите изделие из коробки.
2. Поверните обе стороны ходунков, пока не услышите характерный щелчок.
3. Отрегулируйте высоту ходунков. Убедитесь, что ножки ходунков находятся на одинаковой высоте. Медные фиксирующие шарики должны полностью выскочить из отверстий.
4. Чтобы сложить ходунки, необходимо нажать на фиксирующий замок и повернуть обе стороны ходунков внутрь.

Расположите ходунки на желаемой дистанции от вас. Используя свои руки как опоры, подойдите ближе к раме ходунков. Не подходите слишком близко к передней раме ходунков, это может нарушить равновесие. Медленно передвигайтесь вперед мелкими шагами.

Чтобы сесть, отодвиньтесь назад, пока ваши ноги не коснутся сиденья. Одной рукой нащупайте сиденье, а другой держитесь за ходунки.

Чтобы встать из положения сидя, оттолкнитесь руками от сиденья и затем возьмитесь за ходунки.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Опоры-ходунки 10180, 10184HR, Quick (XXL), 10185-BA, 10188,
10189, 10180-W, 10180-3W.

Производитель: Valentine International Ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Приложение 1

1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве

Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
ИНН 7734197385

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6

тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru

(адрес, телефон, факс)

в лице

Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет,

что

ОПОРЫ-ХОДУНКИ: АРТ. 10180 (ВЫСОТА 66-81 СМ.; ВЫСОТА 80-95 СМ.), АРТ. 10180-3W, АРТ. 10180-W, АРТ. 10181, АРТ. 10184HR, АРТ. 10184, АРТ. 10185 (ВЫСОТА 47-64 СМ.; ВЫСОТА 59-78 СМ.), АРТ. 10185-BA, АРТ. 10188 (ВЫСОТА 65-82 СМ.; ВЫСОТА 82-94 СМ.), АРТ. 10189, АРТ. ROLL DUO, АРТ. ROLL TRIO, АРТ. ROLL QUATTRO, АРТ. ROLL PUSH, АРТ. ROLL EURO, АРТ. QUICK, АРТ. SMART,

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ: АРТ. 10020 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА НА ХОДУНКИ, АРТ. 10038 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА НА ХОДУНКИ, АРТ. 10173 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10174 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10175 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10176 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10177 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10178 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ С ПОВОРОТОМ НА 360, АРТ. 10179 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ МОДЕЛЕЙ (10184, 10185)

Изготовитель продукции: VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД).

8th FLOOR, No 149, Sec. 2, TA TUNG Rd. 221, HSICHIN CITY, TAIPEI HSIEN, Тайвань (Китай), ЗАВОДЫ:
- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS CO. LTD., №152 WU FU ROAD, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (КИТАЙ)

- ST. YORK ENTERPRISE CO., LTD., №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (КИТАЙ)

- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD, NEW CITY DISTRICT. DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (КИТАЙ)

- Shanghai Xinde Hardware Factory, Beiguan Village, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China (Китай)

Код ОК 005 (ОКП) 94 5150 Код ТН ВЭД СНГ 9021 10 100 0

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

Серийный выпуск

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010, ГОСТ Р 51632-2000,

соответствует требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011,

ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании

протоколов испытаний: №№ 1739.014, 1687.014 от 21.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России (№ РОСС RU.0001.21ИМ33);

№ 1124/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)

регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09870 от 21.06.2011

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 16.05.2014 Декларация о соответствии действительна до 15.05.2019



М.П.

(Подпись)

С.П.Бадалян

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.

141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29

Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@anogemc.ru

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

№ РОСС TW.МЕ77.Д00351 от 16.05.2014

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



М.П.

(Подпись)

Д.А.Дружинин

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок