

medi



Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3

protect. Abdominal support

Назначение

protect.Abdominal support является эластичным бандажом для живота. Продукт предназначен исключительно для использования в качестве ортопедического бандажа для живота. Его можно наносить только на неповрежденную кожу в качестве раневого покрытия.

Показания

- при постоперационных состояниях
- после хирургических операций в области грудной клетки и брюшной полости
- при постоперационных отеках
- при ушибах грудной клетки
- при переломах ребер
- для поддерживания брюшных мышц
- для снижения нагрузки на позвоночник
- для ускорения процесса заживления рубцов

Противопоказания / Побочные эффекты

До настоящего времени не выявлены

Инструкция по наложению

- Расположите поддерживающий бандаж для живота вокруг тела.
- Застегните бандаж, слегка потянув за оба конца и наложив их один на другой.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean.

- Не отбеливать.
- Сушить на воздухе.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Полиэфир, эластодиен, полиамид, хлопок

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.