

Сведения о сертификации

Наименование: Ходунки Dayang Medical XR 204
(вид 136510)
Р/у от 08.09.2016 № РЗН 2016/4717
Производитель: «Гуандун Даянг Медикал
Технолоджи Ко., Лтд.», Китай
Guangdong Dayang Medical Technology Co.,
Ltd., Xingxian Development Zone,
Changhongling Industrial Park (2nd Phase),
Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, Guangdong,
China
Импортер в России:
ООО «Реамед»
Адрес : 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
Тел: +7 (473) 300-31-91
По вопросам гарантийного обслуживания
Вы можете обратиться по телефону:
8-800-500-14-14
www.ortonica.ru

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи.
Срок хранения не ограничен.
Быстроизнашиваемые детали гарантийному об-
служиванию не подлежат.

Дата продажи	Подпись продавца/Поставщика
	М.П.




Ходунки двухколесные XR 204



ortonica.ru

 vk.com/ortonica

 @ortonica

 8-800-500-14-14



Инструкция по эксплуатации

8-800-500-14-14
ortonica.ru



Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

1. Назначение

Двухколесные ходунки Ortonica XR 204 предназначены для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ходунки изготовлены из алюминиевого сплава, имеют высококачественное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.

Ходунки оснащены передними колесами, эта функция позволяет передвигаться достаточно быстро, не теряя равновесия.

2. Показания к применению

- Нарушение функции опорно-двигательного аппарата;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы;
- Умеренные и выраженные явления гемипареза.

3. Противопоказания



Перед эксплуатацией ходунков рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом.

- Выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей;
- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.

4. Эксплуатация

1. Перед первой эксплуатацией рекомендуем воспользоваться сторонней помощью;
2. Разложите раму;
3. Внимательно осмотрите ходунки, убедитесь в целостности соединительных узлов;
4. Отрегулируйте высоту ножек. Для этого нужно сжать фиксатор, и переустановить опору на нужный уровень (рис. 1.). Когда фиксатор попадет в пазы, опора зафиксируется. Все опоры должны быть отрегулированы симметрично.



Убедитесь, что ножки надежно зафиксированы!



Рис. 1

5. Ходунки компактно складываются. Чтобы сложить конструкцию необходимо нажать на фиксатор на раме (рис. 2), затем свести по направлению друг к другу левую и правую опорные стороны ходунков (рис. 3).

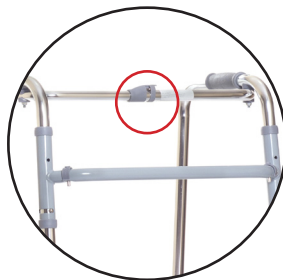


Рис. 2



Рис. 3

5. Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками;
- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться;
- С осторожностью перемещайтесь по мокрым и скользким поверхностям;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Нельзя использовать ходунки при головокружении;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку;
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, не акцентируя внимание на ходунках.

6. Хранение и уход

Рекомендуем хранить ходунки в сухом и чистом месте. Конструкция компактно складывается, поэтому не занимает много места.

Очищать раму и другие части изделия с помощью мягкой ткани с использованием мыльных моющих средств. После очистки, изделие просушить.

7. Технические характеристики

Параметры	XR 204
Габариты (Д/Ш/В), (± 1 см)	51/58/78-93
Ширина между ручками, (± 1 см)	44
Грузоподъемность, кг	100
Масса (нетто/брутто), кг	2,7
Количество штук в упаковке	1

Комплектация: Ходунки 1 шт.;
Руководство 1 шт.