

**medi**

## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.

## circaid® cover up arm

---

Внешний лайнер circaid cover up arm - трубчатое трикотажное изделие для верхней конечности, предназначенное для использования поверх любого компрессионного бандажа circaid. Гладкая поверхность внешнего лайнера предупреждает раздражение окружающих тканей и защищает от повреждений одежду.

---

### Утилизация

Утилизировать с бытовыми отходами. К изделиям не применяются специальные требования по утилизации.

### Состав материала

circaid cover up arm:  
80% Нейлон  
18% Эластан  
2% Полиэтилен



Данное изделие не содержит латекс.

### Рекомендации по стирке

Изделие можно стирать в машине, используя режим деликатной стирки и сушить при невысокой температуре. При этом во избежание налипания ворса на застёжки-липучки и повреждения другой одежды рекомендуется помещать изделие в защитную сетку.

---



Машинная стирка, в теплой воде



Не отбеливать



Сушить в сушильной машине при невысокой температуре



Не гладить



Не применять химчистку

---

## **Надевание и снятие**

### **Надевание.**

Убедитесь, что все ленты Вашего компрессионного изделия закреплены. Застежки-липучки не должны выходить за край изделия. Удалите кусочек войлока, находящегося между застежками-липучками внешнего лайнера. Заверните верхний край внешнего лайнера так, чтобы были видны две застежки-липучки. Это поможет предотвратить приклеивание липучек к изделию при его надевании. Затем наденьте внешний лайнер на компрессионное изделие. Прикрепите застежки-липучки внешнего лайнера к компрессионному изделию в желаемом положении.

### **Снятие.**

Для того, чтобы снять внешний лайнер *circaid cover up arm*, снимите его с руки и прикрепите кусочки войлока к застежкам-липучкам для того, чтобы на них не налипал ворс.

---

### **Примечание.**

Изделие не обеспечивает терапевтическую компрессию.

---

## circaid® cover up leg

Внешний лайнер circaid cover up leg - трубчатое трикотажное изделие для нижней конечности, предназначенное для использования поверх любого компрессионного биндажа circaid. Гладкая поверхность внешнего лайнера предупреждает раздражение окружающих тканей и защищает от повреждений одежду.

### Утилизация



Утилизировать с бытовыми отходами. К данному изделию не применяются специальные требования по утилизации.

### Состав материала

cicaid cover up lower leg  
внешний лайнер на область голени / circaid cover up whole leg  
внешний лайнер на область

нижней конечности  
80% Нейлон  
20% Эластан



Данное изделие не содержит латекс.

### Рекомендации по стирке

Изделие можно стирать в машине, используя деликатный режим и сушить при невысокой температуре. При этом во избежание налипания ворса на застёжки-липучки и повреждения другой одежды рекомендуется, помещать изделие в защитную сетку.



Машинная стирка, в теплой воде



Не отбеливать



Сушить в сушильной машине при невысокой температуре



Не гладить



Не применять химчистку

## Надевание и снятие

### Надевание.

Убедитесь, что все ленты Вашего компрессионного изделия закреплены. Застежки-липучки не должны выходить за край изделия. Удалите кусочек войлока, находящегося между застежками-липучками внешнего лайнера. Заверните верхний край внешнего лайнера так, чтобы были видны две застежки-липучки. Это поможет предотвратить приклеивание липучек к изделию при его надевании. Затем наденьте внешний лайнер на компрессионное изделие. Прикрепите застежки-липучки внешнего лайнера к компрессионному изделию circaid в желаемом положении.

### Снятие.

Для того, чтобы снять внешний лайнер circaid cover up leg, снимите его с ноги и прикрепите кусочки войлока к застежкам-липучкам для того, чтобы на них не налип ворс.

---

### Примечание.

Данное изделие не обеспечивает терапевтическую компрессию.

---