

medi

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3



4

Elbow support

Назначение

Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения локтевого сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Отек тканей и выпот в полость сустава
- Воспаление при ревматизме и остеоартрите

Противопоказания

Окклюзии артерий, лимфедема верхней конечности

Свойства

- Высокая эластичность изделия, вязка с учетом анатомических пропорций и способность растягиваться в двух направлениях обеспечивает оптимальное прилегание к телу.
- Компрессионный эффект ускоряет рассасывание отека и внутрисуставного выпота, удаление продуктов обмена.
- Бандаж быстро уменьшает воспаление и облегчает боли в пораженных областях.

Рекомендации по применению

Возьмите бандаж за верхний край (место, где находится ярлычок) и натяните на локоть так, чтобы «зона комфорта» располагалась над локтевым сгибом. Бандаж занял правильное положение, если локоть находится в зоне специальной анатомической вязки.

Рекомендации по уходу

Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиамид, эластан

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!