



Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами: сиденья для ванн, стулья для ванн, поручни для ванн: Поручни для ванн: арт. 10400, характеристика (С)

Руководство по эксплуатации



Введение

Настоящее руководство содержит подробную информацию о функциональном назначении и эксплуатационных особенностях Средств для самообслуживания и ухода за инвалидами: Поручней для ванн: арт. 10400

1. Область применения / показания

Поручень для ванн 10400 (С) предназначен для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проблемами со спиной, общей слабостью и пожилых людей и помогает им обходиться без посторонней помощи во время принятия водных процедур или выполнения гигиенических мероприятий, а также обеспечивает дополнительную безопасность в ванной комнате.


Рекомендации по установке:

1



Используя плоскую отвертку, вставьте ее в отверстие между крышкой и корпусом поручня, надавите вниз и снимите крышку. Повторите процедуру с другого конца.

2

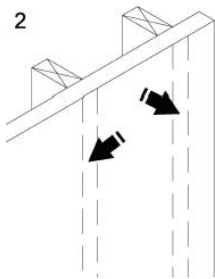


Внимание:

Поручень должен быть установлен только на бетонной стене или в местах с внутренними стойками.


3




Поместите поручень в том месте, где намерены его установить, и отметьте места для болтов карандашом.

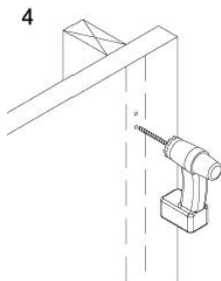

Проделайте отверстия диаметром 0,3 см в местах, отмеченных карандашом.

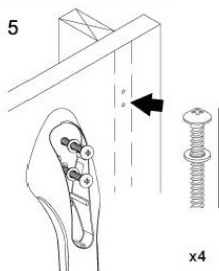

Зафиксируйте поручень с помощью болтов и шайб на стене.

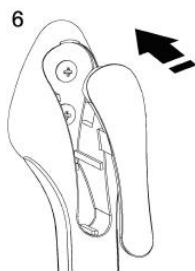


Установите крышки на поручне.

2. Технические характеристики

- Поручень настенный для ванн.
- Материал: ударопрочный, гигиенический пластик, алюминий, резина.
- Крепление с помощью 2-х шурупов с каждой стороны.
- Крепёжная часть диаметром 50 мм.
- Декоративная накладка на крепёжную часть.
- Резиновая вставка на внутренней части рукоятки.
- Расстояние от трубки до стены: 6,6 см.
- Длина между отверстиями для крепления: 22,9 см.
- Длина рукоятки: 18 см.
- Максимальная нагрузка: 115 кг.
- Производство: Тайвань (Китай).
- Гарантия: 6 месяцев.

Габаритные размеры:

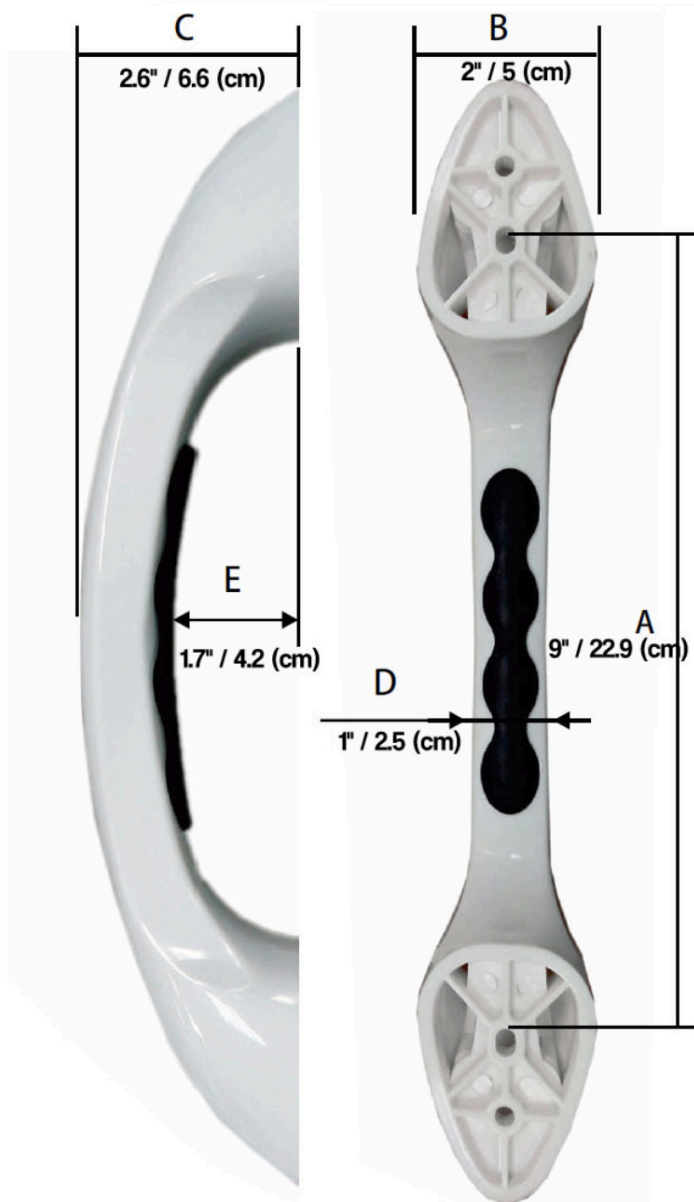

3. Безопасность

Прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием.

Поручень должен быть установлен только на бетонной стене или в местах с внутренними стойками.

Проверяйте перед применением надежность крепления поручня, переустановите в случае необходимости.

Не используйте поручень для поддержки веса пользователя, только для поддержки баланса.

4. Уход и чистка

Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем тщательно высушите.

5. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Средств для самообслуживания и ухода за инвалидами: Поручней для ванн: арт. 10400, характеристика (С)

РУ от 21.06.2011 № ФСЗ 2011/09871

Производитель: Valentine International Ltd

8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.
