

medi



## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать  
онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

## Инструкция по использованию

### M.step («М.СТЕП»)

Ортез голеностопный с пенно-гелевыми вкладышами.

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2011/09662

от 21 апреля 2011 года, срок действия не ограничен.

### Уважаемый покупатель,

спасибо, что Вы выбрали ортез M.step. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете правила его эксплуатации.

### Показания

Консервативное лечение и послеоперационное ведение пациентов с повреждением связок голеностопного сустава.

Хроническая нестабильность голеностопного сустава.

Состояния и деятельность, при которых необходима дополнительная стабилизация голеностопного сустава.


### Принцип действия

Жесткие накладки обеспечивают ротационную стабильность сустава, а пенно-гелевые вкладыши идеально повторяют конфигурацию сустава и обеспечивают равномерную компрессию.

### Противопоказания

Нельзя применять изделие непосредственно на открытую рану.

### Инструкция по надеванию

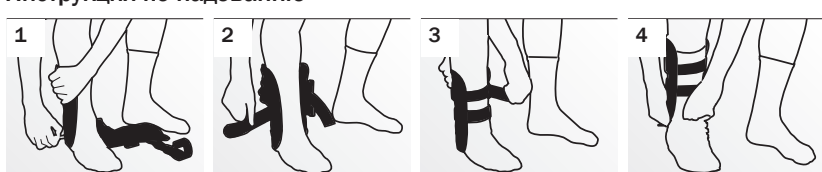

- Отрегулируйте ширину пяточной области ортеза. Расположите тканевый упор для пятки с помощью застежек-липучек так, чтобы боковые вкладыши охватили лодыжки, тесно прилегая к ним (рис. 1).
- Расстегните застежки-липучки обоих ремней.
- Поддерживая поврежденный сустав в положении сгибания на 90°, расположите ортез так, чтобы пятка находилась в центре тканевого упора, а боковые вкладыши охватывали лодыжки, тесно прилегая к ним (рис. 2).
- Теперь застегните застежку-липучку нижнего ремня. Проверьте, чтобы боковые вкладыши были параллельны друг другу (рис. 3).
- Застегните застежку-липучку верхнего ремня.
- Повторно затяните ремни так, чтобы ортез плотно прилегал к голеностопному суставу, но не сдавливал его (рис. 4).

### Важная информация

Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие только согласно рекомендациям лечащего врача.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии использования изделия по назначению.


Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

### Срок годности изделия

Срок годности не ограничен.

### Инструкция по уходу

Перед стиркой отделите пластиковые наклейки. При загрязнении пластиковых накладок их необходимо протирать влажной тряпкой. Стирайте изделие вручную в прохладной воде (30 °С) с использованием обычного мыла. Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие на воздухе. Не гладьте. Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. После использования в воде тщательно прополощите изделие и высушите на воздухе. Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов.

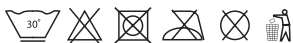

### Состав

Тканевая основа:

полиэстер

Наполнитель:

уретан

Шина:

полипропилен, акрил

### Инструкция по хранению

Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

### Инструкция по утилизации

Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

### Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный представитель производителя в России по адресу: 121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1