

medi

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

circaid® compression anklet

Предназначение

circaid compressen anklet - это нестерильный эластичный компрессионный носок индивидуального многократного использования, предназначенный для обеспечения компрессии в области стопы и голеностопного сустава у пациентов с венозной недостаточностью и лимфедемой.

Показания

- Лимфедема
- Другие формы отеков:
 - венозные
 - посттравматические
 - послеоперационные
- Липедема
- Варикозная болезнь(всех типов)
- Хроническая венозная недостаточность (ХВН)

- Венозный стаз
- Несостоятельность венозных клапанов
- Посттромботический синдром
- Трофические венозные язвы
- Ангиодисплазия
- Состояния после склеротерапии
- Профилактика тромбозов
- Венозная экзема
- Липодерматосклероз

Относительные противопоказания

В соответствии с существующими противопоказаниями, лечащий врач оценивает состояние пациента и соотносит потенциальную пользу от применения данного компрессионного изделия (например, при хронической венозной недостаточности) с возможными рисками терапевтического применения данного медицинского изделия у пациента.

- Нарушение или отсутствие чувствительности нижних конечностей

- Аллергические реакции на компоненты компрессионного изделия

Абсолютные противопоказания

Состояния, при которых использование компрессионных изделий абсолютно исключено, несмотря на наличие показаний (например, хроническая венозная недостаточность).

- Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей средней и тяжелой степени
- Декомпенсированная сердечная недостаточность
- Септический флебит
- Синий болевой флебит
- Инфекция области голеностопного сустава и/или стопы

Хранение



Хранить в сухом месте



Беречь от солнечного света

Гарантийный срок реализации в виде символа песочных часов и обозначения даты «месяц–год» указан на наклейке изготовителя, расположенной на упаковке изделия. Изготовленные по индивидуальному заказу изделия являются товаром для немедленного использования и гарантийный срок реализации на них не указывается.

Это изделие нельзя резать или модифицировать любым иным способом.

Срок эксплуатации

Изделие circaid compression anklet имеет срок эксплуатации при ежедневном использовании не более 3 месяцев.

Ввиду износа материала медицинская эффективность изделия может быть гарантирована только на указанные сроки эксплуатации при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в настоящей

инструкции по использованию.

Утилизация



Утилизировать с бытовыми отходами. К медицинским компрессионным изделиям не применяются специальные требования по утилизации.

Маркировка CE

Маркировка CE ставится на все серийные изделия и подтверждает соответствие Директиве ЕС 93/42/ЕЕС.

На основании Директивы ЕС 93/42/ЕЕС маркировка CE не ставится на изделия, изготовленные по индивидуальным меркам по требованию заказчика. Такие изделия соответствуют основным требованиям Приложения I Директивы.

Состав материала


circaid compression anklet:
88% Нейлон
12% Эластан




Данное изделие не содержит латекс.

Инструкции по стирке

Чтобы продлить срок службы изделия, его следует стирать вручную и сушить не отжимая. Однако изделие можно также стирать в машине, используя деликатные моющее вещество и режим деликатной стирки, и сушить при невысокой температуре.

 Машинная стирка в теплой воде

 Не отбеливать

 Сушить в сушильной машине при невысокой температуре

 Не гладить

 Не применять химчистку

 Не отжимать

Примечание

В случае возникновения малейшей боли немедленно снимите изделие и проконсультируйтесь с врачом. При использовании изделия оно никогда не должно причинять боль. Должно быть ощущение надежности и комфорта. Компрессионный носок circaid compression anklet можно носить днем и ночью, но если пациент испытывает дискомфорт в положении лежа, то его следует снять.

Надевание

При использовании изделия circaid compression anklet убедитесь, что вы уже одели компрессионное изделие circaid для ног и внутренний лайнер. Для предупреждения некомфортной носки из-за складок на внутреннем лайнере, убедитесь, что Вы натянули нижнюю часть внутреннего лайнера сверху на нижнюю часть изделия circaid для ноги.

Шаг 1.

Для более легкого одевания просуньте руку в изделие circaid compression anklet и выверните его полностью наизнанку.

Шаг 2.

Натяните circaid compression anklet на ногу и убедитесь, что он натянут достаточно высоко и перекрывает компрессионное изделие circaid для ноги.

Снимание

Стяните компрессионный носок
circaid compression anklet со
стопы.

Указание по размерам

Стандартный размер:

- для окружности свода стопы в диапазоне 19 - 36 см
- для окружности надлодыжечной области в диапазоне 19 - 27 см

Большой размер:

- для окружности свода стопы в диапазоне 22 - 41 см
 - для окружности надлодыжечной области в диапазоне 25 - 50 см
-