

medi



# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать  
онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3

# medi Kniebandage

---

## Назначение

Бандаж на коленный сустав medi Kniebandage может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа.

---

## Показания

- Растяжение связок коленного сустава
- Отек и выпот в полости сустава
- Воспаление (при ревматизме, остеоартрите)

## Противопоказания

Окклюзии артерий, флебиты, венозные язвы, состояние после тромбоза вен. При варикозной болезни и постоянном отеке нижней конечности следует одновременно с бандажом носить медицинский компрессионный чулок до колена (A-D).

## Рекомендации по применению

Возьмите бандаж за верхний край и натяните его через стопу и голень до колена (рис. 1). Расположите центр бандажа над надколенником с целью улучшения фиксации (рис. 2). Для снятия изделия захватите нижний край бандажа и стяните его вниз (рис. 3).

## Свойства

- Высокая эластичность изделия, вязка с учетом анатомических пропорций и способность растягиваться в двух направлениях обеспечивает оптимальное прилегание к телу.
  - Компрессионный эффект ускоряет рассасывание отека и внутрисуставного выпота, удаление продуктов обмена.
  - Бандаж быстро уменьшает воспаление и облегчает боли в пораженных областях.
- 

## Рекомендации по уходу

Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
  - Не отбеливать.
  - Сушите на воздухе.
  - Не гладьте.
  - Не подвергать химической чистке.
- 



**Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

**Материалы**

полиамид, эластан

**Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

**Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

**Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!