

medi

# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.



1




2




3



4

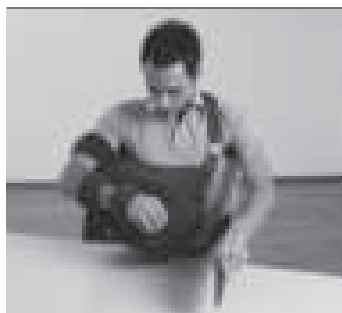

5

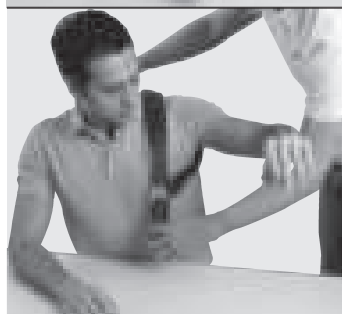

6

# medi SAS® 45

## Назначение

Отводящая шина medi SAS 45 может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения шины в качестве раневого покрытия.

## Показания

- Состояние после реконструкции муфты ротаторов
- Иммобилизация после имплантации протеза плечевого сустава
- Консервативная или послеоперационная терапия субакромиального бурсита
- После акромиопластики
- Снятие напряжения компонентов суставной капсулы сустава после открытой и артроскопической стабилизации плеча
- Иммобилизация верхней конечности при вывихе плеча

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

## Важные замечания

Угол отведения необходимо изменять только по рекомендации врача.

## Рекомендации по применению

Шина medi SAS 45 универсального размера.

Возможно использование изделия для правой и левой руки с целью отведения на 45° или 30°.

- Расстегните все ремни, в том числе, в области кисти.
- Поместите подушку на талию с пораженной стороны и перекиньте плечевой ремень через здоровое

плечо. Прикрепите ремни к подушке с помощью застежки-липучки сначала сзади, а затем спереди.

- Закрепите конец пояса на передней поверхности подушки. Закрепите тренажер для кисти на верхней поверхности подушки с помощью застежек-липучек.
- Закрепите две ленты для предплечья на подушке сверху тренажера для кисти, затем по диагонали прикрепите к подушке ленту для плеча. Лента для плеча предотвращает соскальзывание руки назад.
- Проденьте Вашу руку через ленты, закрепленные на подушках, и застегните застежки-липучки. Убедитесь, что в застегнутом состоянии ленты не стянуты слишком туго. Смена угла отведения (45° или 30°) обеспечивается просто поворотом подушки.

Внимание: следите, чтобы головка плеча не смещалась вверх, когда рука расположена на подушке!

## Рекомендации по уходу

Не носить изделие в воде. Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла, кремы или мази могут вызвать раздражение кожи и износ материала.

- Стирайте наволочки, карманы и ремни предпочтительно с использованием мощного средства medi clean вручную или в шадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушить на воздухе.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



### **Рекомендации по хранению**

Храните изделие в сухом месте. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня покупки при соблюдении покупателем правил, изложенных в инструкции по использованию и уходу, прилагаемой к каждому изделию.

### **Материалы**

пенополиуретан, полиамид

### **Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством.

### **Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### **Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!