


Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно www.medi-salon.ru

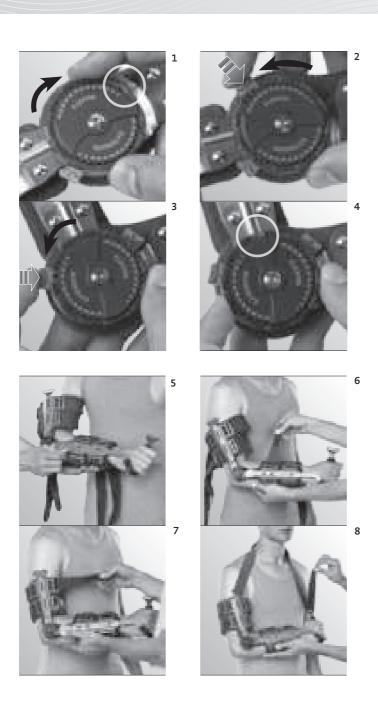

medi Epico ROMs

Назначение

medi Epico ROMs представляет собой локтевой ортез. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения локтевого сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Консервативная функциональная терапия вывихов локтевого сустава
- Консервативное лечение вывихов локтевого сустава с сопутствующими травмами
- Лечение переломов медиального или латерального надмыщелков
- Постоперационное лечение после имплантации протеза
- Восстановительное лечение после стабильных переломов дистальных отделов плечевой кости
- Временная иммобилизация после артролиза плечевого сустава.
- Статическая мобилизующая шина

Противопоказания

Слишком сильное натяжение ремней при застегивании может стать причиной застоев лимфы, поэтому ремни следует регулярно расстегивать.

Установка ограничителей изгиба и поворота

Для Вашего ортеза medi Epico ROMs предварительно настроен угол разгибания и сгибания 0°. Устройство ChronoLock заботится о том, чтобы настроенный угол шарнира не изменялся самопроизвольным образом (например, при ударе).

Для настройки ограничения сгибания и

разгибания всегда поворачивайте колесо ChronoLock, пока контрольное окошко не будет находиться под стрелкой серой кнопки фиксации. Теперь посредством нажатия серой кнопки можно отрегулировать сначала ограничение сгибания, а затем и ограничение разгибания.

После этого в целях безопасности установите колесо ChronoLock в нейтральное положение вне диапазона регулировки сгибания и разгибания. Ограничение сгибания: 0°-120° Ограничение разгибания: 0°-120°

Рекомендации по применению

- Отстегните все застежки-липучки и наденьте ортез так, чтобы шарнир находился непосредственно над латеральным надмыщелком. Длину опоры для кисти можно регулировать с помощью двух винтов на металлической шине.
- Застегните сначала оба плечевых ремня (№ 1 и 2), а затем оба локтевых ремня (№ 3 и 4).
- Проденьте один конец плечевого ремня через кольцо на манжете для плеча и застегните застежкулипучку.
- Перекиньте другой конец ремня через плечо, проденьте его через кольцо на держателе кисти и застегните застежку-липучку.
- Расположите мягкую накладку на ремне так, как это показано на рисунке. Пластиковые элементы ортеза и прокладки при необходимости можно подрезать ножницами.

Рама ортеза изготовлена из алюминия, и при необходимости ее можно подогнать. Тем не менее, избегайте подгонки непосредственно в области сустава.

Внимание

корректируйте диапазоны сгибания и разгибания только по предписанию Вашего врача.

В первые дни после полученной травмы

необходимо чаще ослаблять ремни во избежание сильного опухания конечности.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежкилипучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте мягкую подкладку и покрытия предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке. При правильном использовании шарнирный механизм не требует ремонта, однако его можно смазывать небольшим количеством тефлонового спрея.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Алюминий, пенополиуретан, хлопок

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодетельством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!