

medi



Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



a



b



c



d



e

Rhizomed®

Назначение

Rhizomed представляет собой ортез большого пальца руки. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения сустава большого пальца руки; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

Показания

- Повреждения боковых связок основания большого пальца кисти («палец лыжника»)
- Воспаление пястно-фалангового сустава 1-го пальца кисти
- Послеоперационная иммобилизация

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Рекомендации по использованию

При надевании следите, чтобы угол между большим пальцем и кистью составлял 45° (см. диаграмму)

Рекомендации по надеванию

- Расстегните все застежки-липучки и приложите ортез к руке (рис.а)
- Застегните застежку-липучку на большом пальце (рис.б), затем, прижимая ортез (рис.с), застегните застежку-липучку на запястье (рис.д). При избыточной длине ленты можно укорачивать при помощи ножниц.
- Не затягивайте слишком туго застежку на большом пальце. При ощущении боли ослабьте ремень. Если болевые ощущения сохраняются длительный срок, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
- Для предотвращения излишнего давления в области запястья используйте специальную подушечку (рис.е).

- При необходимости подушечка может использоваться для усиления стабилизации большого пальца.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

алюминий, полиамид

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!