


medi

Инструкция по применению и уходу за изделием




покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru


medi. Почувствуйте себя лучше.

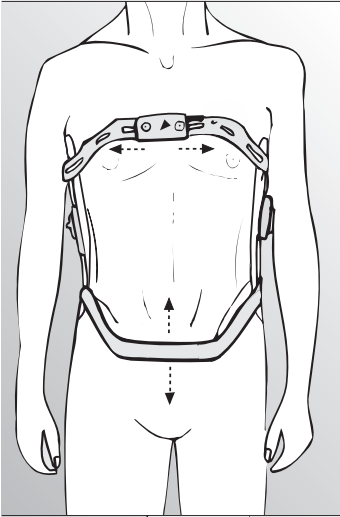

1

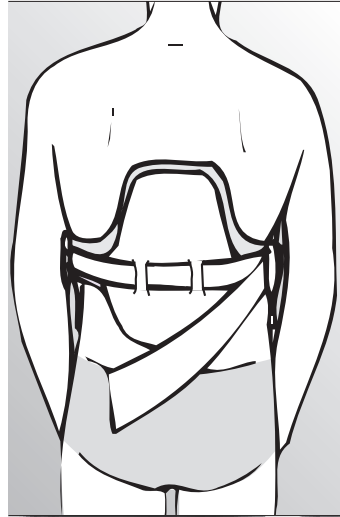

3

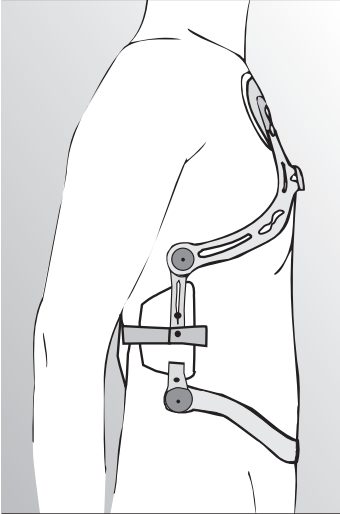

2



4

medi 4C flex

Назначение

medi 4C flex представляет собой гиперэкстензионный ортез. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения поясничного и грудного отдела позвоночника; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

Показания

- Стабильные компрессионные переломы нижнего грудного и поясничного отделов позвоночника
- Осевая стабилизация грудного и поясничного отделов позвоночника при остеопорозе
- Среднесрочная иммобилизация после операций на межпозвонковых дисках
- Наружная стабилизация при болезни Шойермана-Мау (юношеский кифоз)
- Ортопедическая коррекция после хирургических вмешательств по поводу нестабильных переломов тел позвонков
- Длительное лечение при неоперабельных опухолях позвоночника и метастазах в позвонки
- Постоперационная ортопедическая коррекция после хирургического вмешательства по поводу первичных опухолей и метастазов в тела позвонков
- Период реабилитации после хирургической спинальной декомпрессии с внутренней фиксацией или без нее

Противопоказания

Гиперэкстензионный корсет medi 4C flex flex не следует применять при нестабильных переломах грудного и поясничного отделов позвоночника с

неврологической симптоматикой или без нее, требующих хирургического вмешательства. Относительными противопоказаниями могут являться заболевания кожи в зоне, соприкасающейся с подушкой корсета. При таких заболеваниях перед применением изделия следует проконсультироваться с лечащим врачом. При отсутствии дерматологических противопоказаний можно использовать корсет согласно данной инструкции.

Рекомендации по подгонке

Носите изделие поверх тонкой одежды.

• Регулировка ширины

Сначала ослабьте винты в верхней части рамы и отрегулируйте ширину корсета по ширине тела пациента. Предварительно обязательно проверьте свободный ход откидной скобы. Затем ослабьте два винта на боковых отделах рамы и винты на застежке. Подгоните корсет по размеру согласно расстоянию между лонным сочленением и подключичной областью с которой будет контактировать корсет. Затяните все винты.

• Регулировка длины пояса

При помощи застежки-липучки и возвратной петли подгоните длину пояса таким образом, чтобы подушка плотно прилегала к середине спины. Помните, что при застегивании длина пояса на несколько сантиметров уменьшается.

• Открытие и закрытие застежки

Сдвиньте серую пластину в сторону, чтобы открыть застежку. Для застегивания корсета нажмите на крышку до щелчка.

Рекомендации по уходу

Протирайте корсет влажной тряпкой, а подушку для спины очищайте при помощи щетки.

- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Алюминий, ПВХ

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!