



Инструкция по эксплуатации

**LUX 300**

## **Назначение**

Сиденье для ванны Ortonica Lux 300 предназначено для проведения санитарно-гигиенических процедур в ваннных комнатах.

## **Ответственность**

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.



Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте [ortonica.ru](http://ortonica.ru)

## **Указания по технике безопасности**

Рекомендуем перед началом использования сиденья для ванной прочесть инструкцию по эксплуатации. Для безопасной первичной эксплуатации рекомендуем прибегнуть к помощи сторонних лиц.

Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.

Не устанавливайте сиденье на наклонной поверхности

Перед эксплуатацией протрите изделие теплой водой с моющими средствами.

## **Распаковка и сборка**

Сиденье для ванной упаковано в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Изделие не требует сборки, так как поставляется в собранном виде.

# Эксплуатация сиденья для ванны

## Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

## Установка

Установите сиденье на ванную. При необходимости отрегулируйте ширину рамы для соответствия вашей ванной.

## Регулировки

Сиденье для ванны Lux 300 настраивается по ширине ванной. Чтобы изменить ширину рамы, необходимо снять фиксатор и вытащить опору на необходимый уровень. Затем закрепить фиксатор.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

Сиденье для ванны Lux 300

Изготовлено:

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd. Китай, 2018 год

ОКПД 2 32.50.13.190

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2017/6447 от 09.11.2017 года



8 800 500 14 14  
[www.ortonica.ru](http://www.ortonica.ru)