

medi



Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2

medi Thumb support

Назначение

medi Thumb support – это ортез на большой палец руки. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения большой палец руки сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- травмы запястно-пястного и пястно-фалангового суставов 1-го пальца кисти
- нестабильность связок суставов 1-го пальца кисти
- артроз запястно-пястного и пястно-фалангового суставов 1-го пальца кисти
- ревматоидный артрит

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Принцип действия

Иммобилизация и стабилизация суставов 1-го пальца кисти при помощи моделируемой алюминиевой шины.

Рекомендации по надеванию

- Вставьте предварительно смоделированную алюминиевую шину в карман.
- Расстегните ремни и вставьте руку в ортез. Алюминиевая шина должна располагаться с ладонной стороны кисти.
- Застегните ремень в области большого пальца.
- Застегните широкий ремень в области запястья.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки и удалите шарнирные шины. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

лайкра, Алюминий

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!