



## Инструкция по эксплуатации

Перед эксплуатацией противопролежневой системы, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению.

### Ortonica Smart Cell T05

#### Противопролежневая система

Противопролежневая система Ortonica Smart Cell T05 – предназначена для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска. Регулярное чередование воздуха в трубчатых секциях создает эффект непрерывного массажа, нормализует кровообращение и предотвращает появление пролежней. Матрас выполнен из высокопрочного материала ТПУ.

В комплект входит бесшумный автоматический компрессор с возможностью индивидуальной регулировки давления и функцией статического режима.

ortonica.ru  
8-800-500-14-14



Перед эксплуатацией противопролежневой системы, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению.

## Установка и подключение

1. Установите компрессор на плоскую поверхность или прикрепите к основанию кровати с помощью кронштейнов;
2. Положите противопролежневый матрас на стандартный матрас, наденьте на него чехол. Соединительные трубки противопролежневого матраса должны оказаться в нижней части кровати;
3. Убедитесь, что трубки не спутаны и не сдавлены какими-либо предметами;
4. Подсоедините компрессор к матрасу с помощью трубок. Подсоедините кабель питания сначала к компрессору, затем к сети;
5. Нажмите кнопку «On» на панели управления компрессора. Полностью матрас накачается за 10-15 минут.;
6. Застелите матрас простыней, затем уложите пациента;
7. Отрегулируйте уровень давления в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя. При достижении нужного уровня давления индикатор «Normal pressure» загорится зеленым цветом;
8. Противопролежневая система оснащена функцией CPR - экстренный сброс воздуха. В случае необходимости проведения сердечно-легочной реанимации резко выдерните клапан, матрас полностью спустится. Для восстановления работы вставьте клапан и накачайте матрас;
9. Компрессор может функционировать круглосуточно. Для выключения компрессора нажмите кнопку «Off»;
10. На время сна рекомендуем использовать режим «Static». Эта функция поддерживает заданный уровень давления;
11. Четыре верхние секции в зоне изголовья выполняют функцию подушки. Чередование давления в них не предусмотрено.



## Меры предосторожности

- Запрещается держать матрас вблизи с нагревательными приборами;
- Не рекомендуется попадание прямых солнечных лучей;
- При попадании какой-либо жидкости на матрас, необходимо, по возможности, быстро очистить матрас;
- Запрещается стирать матрас в стиральной машине;
- Не рекомендуется попадание жидкости на компрессор;
- Недопустимы удары и падения компрессора;
- Запрещается осуществлять самостоятельный ремонт компрессора.

## Устранение неисправностей/Хранение и уход

Если ваша противопролежневая система не работает должным образом, пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей по устранению неисправностей. Если устранить неисправность самостоятельно не удастся, обратитесь в сервисную службу компании Ортоника.

Тип неисправности		Проблема	Способ устранения
Матрас не накачивается	Индикатор включен	Отсоединена трубка	Подключить к компрессору
	Индикатор выключен	Матрас проколот	Заклейте прокол/ Замените секцию
Матрас надувается не полностью	Индикатор выключен	Не подключено питание	Подключите питание
		Перегорел предохранитель	Замените его
		Давление минимально	Поверните диск направо
		Матрас трещит	Разверните его и вымойте

Если Вы не планируете в течение длительного времени использовать противопролежневую систему, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами ухода и хранения:

1. Включите компрессор и проверьте поток воздуха (воздух должен выходить из трубок попеременно каждые 5-6 минут);
2. Проверьте трубки для воздуха на наличие повреждений;
3. Если изделие функционирует нормально, сверните трубки свободно (чтобы они не согнулись и не повредились) и храните вместе с изделием в полиэтиленовом пакете, чтобы защитить от влаги и пыли.



Не использовать в присутствии тлеющего или открытого огня! Прежде, чем перемещать или ремонтировать компрессор, отключите его от сети!

4. Матрас должен находиться в сухом месте. Избегайте попадания пыли и воды;
5. Протирать матрас необходимо мягкой тканью с помощью мягких моющих средств;
6. Очистку чехла производить мягкой тканью с помощью мыльного раствора. Полностью погружать чехол в воду запрещено.



Использование моющих средств, содержащих в составе красители запрещено. Очистку и дезинфекцию матраса необходимо производить только в накачанном виде.

## Технические характеристики/Гарантийное обслуживание

Система противопролежневая надувная с регулируемым давлением  
Ortonica Smart Cell T05  
Размер матраса: 203x90x12 см (±5%)  
Материал матраса: ТПУ/нейлон  
Материал основы: тарпаулин  
Количество трубчатых секций: 18 шт.  
Грузоподъемность: 150 кг; вес нетто: 4,6 кг

Компрессор Ortonica Mai.air M1  
Мощность: 220V/50 Hz  
Потребляемая мощность: 7 Вт

### Комплектация:

- матрас с надувными ячейками Ortonica Smart Cell - 1 шт.;
- съемный чехол - 1 шт.;
- компрессор электрический Ortonica Mai.air M1 - 1 шт.;
- соединительные трубки - 1 шт.;
- набор для ремонта: 2 заплатки, наждачная бумага - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

Гарантийное обслуживание  
Матрас: 1 год  
Компрессор: 2 года  
Срок службы: 4 года

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону:  
8-800-500-14-14

[www.ortonica.ru](http://www.ortonica.ru)

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

Сведения о сертификации  
Регистрационное удостоверение от 15.08.2018 № РЗН 2018/7489

Производитель:  
Xiamen Senyang Co., Ltd., 4-5 Floor,  
Xingbei Industry, No. 95-99, West 2 Road,  
Jiu Tianhu, Xinglin Xiamen,  
361000 Fujian, China

Импортер в России: ООО «Реамед»  
Адрес : 394026, г. Воронеж,  
Московский пр-т, 11  
Тел: +7 (473) 300-31-91

Дата изготовления: