



Инструкция по эксплуатации

Перед эксплуатацией противопролежневой системы, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Ortonica Bubble B01

Противопролежневая система

Противопролежневая система Ortonica Bubble B01 обеспечивает эффективную профилактику и терапию пролежней. Регулярное чередование давления в ячейках создает эффект непрерывного массажа, улучшает трофику тканей, нормализует кровообращение.

В комплект входит бесшумный автоматический компрессор.

ortonica.ru
8-800-500-14-14



Перед эксплуатацией противоположной системы, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Установка и подключение

1. Установите компрессор на плоскую поверхность или прикрепите к основанию кровати с помощью кронштейнов;
2. Положите противоположный матрас на стандартный матрас, подогните свободный край. Соединительные трубки противоположного матраса должны оказаться в нижней части кровати;
3. Убедитесь, что трубки не спутаны и не сдавлены какими-либо предметами;
4. Подсоедините компрессор к матрасу с помощью трубок;
5. Нажмите кнопку «On» на панели управления компрессора, затем переведите регулятор давления до уровня «5» - матрас начнет наполняться воздухом. Полностью матрас накачается за 10-15 минут;
6. Застелите матрас простыней, затем уложите пациента;
7. Отрегулируйте уровень давления в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя;
8. Компрессор может функционировать круглосуточно. Для выключения компрессора нажмите «Off».



Меры предосторожности

- Запрещается держать матрас вблизи с нагревательными приборами;
- Не рекомендуется попадание прямых солнечных лучей;
- При попадании какой-либо жидкости на матрас, необходимо, по возможности, быстро очистить матрас;
- Запрещается стирать матрас в стиральной машине;
- Не рекомендуется попадание жидкости на компрессор;
- Недопустимы удары и падения компрессора;
- Запрещается осуществлять самостоятельный ремонт компрессора.

Устранение неисправностей/Хранение и уход

Если ваша противоположная система не работает должным образом, пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей по устранению неисправностей. Если устранить неисправность самостоятельно не удастся, обратитесь в сервисную службу компании Ортоника.

Тип неисправности		Проблема	Способ устранения
Матрас не накачивается	Индикатор включен	Отсоединена трубка	Подключить к компрессору
		Матрас проколот	Заклейте прокол
	Индикатор выключен	Не подключено питание	Подключите питание
		Перегорел предохранитель	Замените его
Матрас надувается не полностью	Индикатор выключен	Давление минимально	Поверните диск направо
		Матрас трещит	Разверните его и вымойте

Если Вы не планируете в течение длительного времени использовать противоположную систему, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами ухода и хранения:

1. Включите компрессор и проверьте поток воздуха (воздух должен выходить из трубок попеременно каждые 5-6 минут);
2. Проверьте трубки для воздуха на наличие повреждений;
3. Если изделие функционирует нормально, сверните трубки свободно (чтобы они не согнулись и не повредились) и храните вместе с изделием в полиэтиленовом пакете, чтобы защитить от влаги и пыли.



Не использовать в присутствии тлеющего или открытого огня! Прежде, чем перемещать или ремонтировать компрессор, отключите его от сети!

4. Матрас должен находиться в сухом месте. Избегайте попадания пыли и воды;
5. Протирать матрас необходимо мягкой тканью с помощью мягких моющих средств.



Использование моющих средств, содержащих в составе красители запрещено. Очистку и дезинфекцию матраса необходимо производить только в накачанном виде.

Технические характеристики/Гарантийное обслуживание

Система противоположная надувная с регулируемым давлением
Ortonica Bubble B01
Размер матраса: 200x90x7см (±5%)
Материал матраса: ПВХ
Материал основы: тарпаулин
Грузоподъемность: 135 кг; вес нетто: 1,95 кг
Компрессор Ortonica Brick
Мощность: 110V/60 Hz
Потребляемая мощность: 7 Вт

Комплектация:

- матрас с надувными ячейками Ortonica Bubble - 1 шт.;
- компрессор электрический Ortonica Brick - 1 шт.;
- соединительные трубки - 1 шт.;
- набор для ремонта: 2 заплатки, наждачная бумага - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

Гарантийное обслуживание
Матрас: 1 год
Компрессор: 2 года
Срок службы: 4 года

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8-800-500-14-14

www.ortonica.ru

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

Сведения о сертификации:
Регистрационное удостоверение от 15.08.2018 № РЗН 2018/7489

Производитель:
Xiamen Senyang Co., Ltd., 4-5 Floor, Xingbei Industry, No. 95-99, West 2 Road, Jiu Tianhu, Xinglin Xiamen, 361000 Fujian, China

Импортер в России: ООО «Реамед»
Адрес : 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
Тел: +7 (473) 300-31-91

Дата изготовления: