

medi



Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3



4



5

Manumed

Назначение

Бандаж на лучезапястный сустав Manumed может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа в качестве раневого покрытия.

Показания

- Ревматоидный артрит
- Иммобилизация при деформациях
- Воспаление мягких тканей (хроническое, посттравматическое, послеоперационное)
- Последствия паралича лучевого нерва
- Тендиниты, тендовагиниты

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены

Принцип действия

Иммобилизация и стабилизация запястья и кисти при помощи наладонной алюминиевой шины.

Рекомендации по применению

Для достижения максимального лечебного эффекта Manumed следует носить регулярно.

Рекомендации по надеванию

Правильное положение шины крайне важно для оптимального функционирования; в первый раз изделие должно быть надето обученным специалистом.

- При необходимости алюминиевую шину можно вытащить и моделировать индивидуально (рис. 1)
- Расстегните все ленты и наденьте изделие со вставленной алюминиевой шиной на руку (рис. 2).
- В первую очередь застегните узкую ленту на ладонной части шины, затем — ленту на предплечье (рис. 3).

- Теперь застегните широкую ленту. Эта лента прикреплена к ладонной поверхности изделия при помощи липучки и может быть передвинута в нужное положение (рис. 4 + 5).

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки и удалите шарнирные шины. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Алюминий, полиамид.

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!