

medi

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3



4

medi SLK 90

Назначение

medi SLK 90 представляет собой подушку для поддержки плеча. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения плеча; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Послеоперационная иммобилизация плеча после задней стабилизации
- Послеоперационная иммобилизация при разносторонней нестабильности
- Консервативное лечение травматического заднего вывиха плеча
- Иммобилизация при двусторонней передней и задней нестабильности плеча
- Иммобилизация после удаления передней капсулы плечевого сустава
- Консервативное лечение неосложненных переломов большого бугра плечевой кости
- Транспозиция широчайшей мышцы спины

Противопоказания

- Привычный задний вывих плеча
- Нестабильность плеча при болезни Паркинсона

Рекомендации по надеванию

- Расстегните ремень для талии с помощью красной пряжки, расположенной около подушки. Расположите подушку над подвздошной костью с пораженной стороны.
- Оберните ремень вокруг талии и закрепите его на подушке. Отрегулируйте длину ремня так, чтобы обеспечить оптимальное прилегание подушки к талии.

- Расстегните черную пряжку на передней части подушки и отведите передний ремень за спину. Расстегните ленты на поддерживающей повязке и поместите свою руку в повязку, при этом Ваш локоть должен располагаться в самом углу поддерживающей повязки. Положите кисть руки на шар. Застегните поддерживающую повязку с помощью застежек-липучек.
- Перекиньте плечевой ремень со спины через здоровое плечо вперед. Теперь проденьте руку в петлю, как будто Вы надеваете пиджак.
- Закрепите плечевой ремень с помощью черной пряжки на передней части подушки. Отрегулируйте длину плечевого ремня. Проверьте, чтобы ремень был натянут, но не врезался в кожу под рукой. Если ремень слишком длинный, Вы можете расстегнуть Y-образную застежку-липучку, обрезать ремень ножницами до нужной длины и снова застегнуть Y-образную застежку-липучку.

Рекомендации по уходу

Не носить изделие в воде. Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

пенополиуретан, полиамид

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!