



Инструкция по эксплуатации

**LUX 505**

## **Назначение**

Табурет для ванной комнаты Ortonica Lux 505 предназначен для проведения санитарно-гигиенических процедур в ваннных комнатах.

## **Ответственность**

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.



Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте [ortonica.ru](http://ortonica.ru)

## **Указания по технике безопасности**

Рекомендуем перед началом использования сиденья для ванной прочесть инструкцию по эксплуатации. Для безопасной первичной эксплуатации рекомендуем прибегнуть к помощи сторонних лиц.

Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.

Не устанавливайте сиденье на наклонной поверхности


Перед эксплуатацией протрите изделие теплой водой с моющими средствами.

## Распаковка и сборка

Сиденье для ванной упаковано в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить.

### Инструкция по сборке.

Расположить ножки в выемки под сиденьем, и зафиксировать болтами, входящими в комплект поставки.

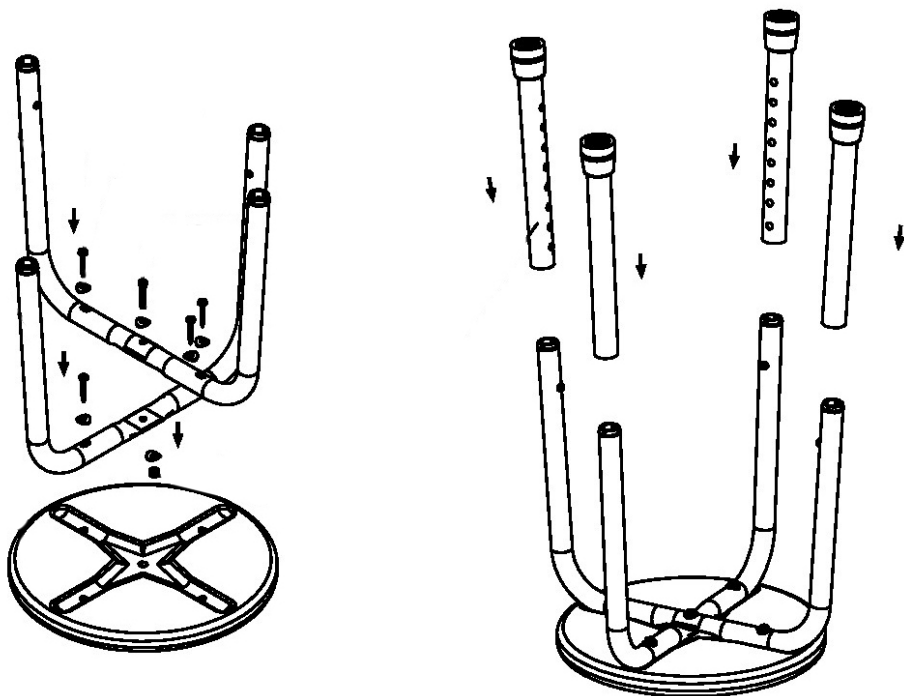

## Эксплуатация сиденья для ванны

### Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

### Регулировки

Табурет для ванной Lux 505 регулируется по высоте. Чтобы изменить высоту стула необходимо нажать на пружинные фиксаторы, выбрать необходимый уровень и

### Гарантийный талон

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

| Дата продажи | Подпись продавца / Поставщика |
|--------------|-------------------------------|
|              |                               |





8 800 500 14 14  
[www.ortonica.ru](http://www.ortonica.ru)