



Инструкция по эксплуатации

LUX 310

Назначение

Сиденье для ванны Ortonica Lux 310 предназначено для проведения санитарно-гигиенических процедур в ваннных комнатах.

Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.



Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте ortonica.ru

Указания по технике безопасности

Рекомендуем перед началом использования сиденья для ванной прочитать инструкцию по эксплуатации. Для безопасной первичной эксплуатации рекомендуем прибегнуть к помощи сторонних лиц.

Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.

Не устанавливайте сиденье на наклонной поверхности

Перед эксплуатацией протрите изделие теплой водой с моющими средствами.

Распаковка и сборка

Сиденье для ванной упаковано в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Изделие не требует сборки, так как поставляется в собранном виде.

Эксплуатация сиденья для ванны

Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

Установка

Установите сиденье на ванную. При необходимости отрегулируйте ширину рамы для соответствия вашей ванной.

Регулировки

Сиденье для ванны Lux 310 настраивается по ширине ванной. Чтобы изменить ширину рамы, необходимо ослабить фиксаторы, установить необходимый уровень и затянуть фиксаторы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

Сиденье для ванны lux 310

Изготовлено:

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd. Китай,

2018 год ОКПД 2 32.50.13.190

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2017/6447 от 09.11.2017 года



8 800 500 14 14
www.ortonica.ru