



www.barry-care.com

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кресла-коляски предназначены для передвижения пациентов с ограниченными двигательными возможностями с помощью сопровождающего лица.

Barry W2

Barry W24

Barry W3

Barry W4



КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

Содержание

Введение	3
Ответственность	3
Условия использования	3
Применение и показания	4
Противопоказания	5
Подготовка кресел-колясок к использованию	6
Barry W24 (5019W24)	6
Barry W2 (5019W2P)	7
Barry W3 (5019C0103SF)	8
Barry W4	9
Меры предосторожности при использовании	10
Техническое обслуживание, уход за изделием и дезинфекция	11
Транспортировка, хранение и утилизация	11
Условия гарантии	12
Для заметок	14
Сопутствующие товары	15

Введение

Уважаемый Клиент,

Благодарим Вас за Ваш выбор и приобретение кресла-коляски Barry. Данное кресло-коляска обеспечит Вам комфортное и безопасное передвижение. Мы гарантируем высокое качество выбранного Вами Изделия, сочетающего в себе современную функциональность и надежность. Перед использованием кресла-коляски обязательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. В нем содержится вся информация о функциях, необходимых для ежедневного применения кресел-колясок Barry. Желаем Вам комфортной и безопасной эксплуатации Изделия.

Ответственность

Изготовитель рекомендует использовать Изделие и осуществлять уход за ним в соответствии с его руководством по эксплуатации.

Изготовитель несет ответственность по гарантийным обязательствам только в том случае, если Изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним.

Изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, полученные в результате его неправильного использования, проведения ремонтных работ не в специализированных сервисных центрах или применения в изделии запасных частей и компонентов, не предусмотренных Изготовителем. Работы по ремонту и гарантийному обслуживанию Изделия могут выполняться только в специализированных мастерских или непосредственно Изготовителем.

Назначение

Кресла-коляски Barry предназначены для передвижения людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.

Кресла-коляски Barry пригодны только для использования в помещениях на твердых и ровных поверхностях.

Кресла-коляски Barry пригодны для многократного применения. При использовании другим пациентом кресло-коляску необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию его состояния.

Описание принципов работы

Кресла-коляски Barry приводятся в движение вручную и служат исключительно для передвижения пациента с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающего его лица. Пользоваться креслами-колясками Barry без посторонней помощи разрешается только тем лицам, которые в силу своих физических и умственных способностей в состоянии правильно их эксплуатировать (приводить в движение, управлять, тормозить). Кресла-коляски Barry должны соответствовать Вашему состоянию здоровья.

Применение и показания

Кресло-коляска используется пациентами для перемещения в лечебном учреждении, дома или в других помещениях.

Кресла-коляски могут также использоваться при следующих заболеваниях:

- Манингомиелит
- Прогрессирующая мышечная дистрофия
- Детский церебральный паралич
- Множественный склероз

- Гемиплегия центральной части тела
- Посттравматические повреждения мозга
- Деформации конечностей средней тяжести
- Дисмелия
- Фокомелия
- Выраженный остеогенез
- Судороги, незначительные повреждения суставов
- Полиартрозы
- Полиартриты, болезнь Бехтерева

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Использование кресел-колясок Barry противопоказано:

- При расстройствах психических функций с выраженным снижением критики, интеллекта, частыми эпилептиформными припадками, выраженными нарушениями ориентации, а также при выраженных нарушениях функций органа зрения.
- При наркологической зависимости, алкоголизме.
- По показаниям врача.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Barry W24 (5019W24)



- Кресло-коляска с санитарным устройством.
- Материал рамы: сталь с порошковым напылением.
- Обивка сиденья: кожзаменитель.
- Откидные подлокотники.
- Съёмные подножки, регулируемые по высоте.

Порядок работы

1. Извлеките Изделие из упаковки и разложите его.
2. Вставьте спинку коляски в раму и закрутите винты.
3. Установите задние колеса во втулках на раме, затяните болты.
4. Закрепите стояночные тормоза с помощью инструментов.
5. Установите правую и левую подножки по очереди. Расположите на одной линии отверстия на подножке и штифты-фиксаторы, находящиеся над передним колесом. Как только штифты-фиксаторы войдут в отверстия, поверните подножку к центру кресла-коляски для фиксации. При желании наденьте ремень опоры для голени на крепления с задней стороны подножек.



44 см/66 см



96 см



46 см



106 см



100 кг



20 кг

Barry W2 (5019W2P)



- Кресло-каталка с санитарным устройством.
- Материал рамы: сталь с порошковым напылением.
- Обивка сиденья: кожзаменитель.
- Откидные подлокотники.
- Съёмные подножки, регулируемые по высоте.
- Задние колеса с тормозами.

Порядок работы

1. Извлеките Изделие из упаковки и разложите его.
2. Установите правую и левую подножки по очереди. Расположите на одной линии отверстия на подножке и штифты-фиксаторы, находящиеся над передним колесом. Как только штифты-фиксаторы войдут в отверстия, поверните подножку к центру кресла-коляски для фиксации. При желании наденьте ремень опоры для голени на крепления с задней стороны подножек.



44 см/58 см



95 см



46 см



75 см



100 кг



16 кг

Barry W3 (5019C0103SF)



- Складная кресло-каталка.
- Материал рамы: хромированная сталь.
- Обивка сиденья: нейлон.
- Складная спинка.
- Ремень-фиксатор.
- Съёмные подножки, регулируемые по высоте.

Порядок работы

1. Извлеките Изделие из упаковки и разложите его.
2. Установите правую и левую подножки по очереди. Расположите на одной линии отверстия на подножке и штифты-фиксаторы, находящиеся над передним колесом. Как только штифты-фиксаторы войдут в отверстия, поверните подножку к центру кресла-коляски для фиксации. При желании наденьте ремень опоры для голени на крепления с задней стороны подножек.



46 см/58 см



102 см



45 см



84 см



100 кг



13 кг

Barry W4



- Складная кресло-каталка.
- Материал рамы: алюминий.
- Обивка сиденья: нейлон.
- Откидные подлокотники.
- Ремень-фиксатор.

Порядок работы

1. Извлеките Изделие из упаковки и разложите его.
2. Убедитесь, что соединяющие механизмы раскрыты до упора.



32 см/51 см



88 см



46 см



75 см



100 кг



6,9 кг

Меры предосторожности при использовании

- Не пытайтесь дотянуться до какого-либо предмета, если Вам для этого необходимо передвинуться на сидении вперед.
- Не пытайтесь поднимать предметы с пола, наклоняясь между коленями.
 - Не наклоняйтесь над верхним краем спинки, чтобы достать до предметов, находящихся позади Вас: это может привести к опрокидыванию коляски.
 - Всегда устанавливайте одновременно оба стояночных тормоза.
 - Стояночные тормоза используются только после остановки коляски: ни в коем случае не применяйте их для снижения скорости коляски или в качестве опоры при пересадке.
 - Не рекомендуется преодолевать лестничные пролеты и высокие препятствия без посторонней помощи.
 - При преодолении повседневных препятствий (ступенек, порогов) нужно расположить задние колеса коляски по направлению движения.
 - Сопровождающим лицам не следует поднимать коляску, держась за съемные части.
 - При подъеме или спуске по наклонным поверхностям сопровождающему лицу следует придерживать коляску за ручки.
 - Не оставляйте коляску на наклонных поверхностях.
 - При посадке или высадке в/из кресла-коляски Barгу следует поставить задние (приводные) колеса на стояночные тормоза.
 - При начале использования коляски избегайте резких движений и толчков. Это может привести к опрокидыванию.
 - Во избежание травм берегите пальцы от подвижных деталей.

Техническое обслуживание

Работоспособность кресел-колясок должна проверяться каждый раз до их применения. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться в специализированный сервис с целью их устранения. Особенно, это касается случаев, когда изменяются ходовые качества Изделий или снижается их устойчивость.

Необходимо периодически самостоятельно смазывать машинным маслом механизм складывания, подвижные и съемные части коляски.

Техническое обслуживание и ремонт кресел-колясок Barry, включая гарантийный ремонт, производится на территории РФ уполномоченным дистрибьютором производителя - ООО «СИМС-2» по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5.

Уход за изделием и дезинфекция

Чтобы максимально продлить срок службы кресел-колясок Barry, следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Очистите металлические элементы влажной мягкой салфеткой. При этом может использоваться мягкое чистящее средство.
- При загрязнении кресел-колясок, по возможности, немедленно сотрите влажную грязь и тщательно досуха вытрите кресла-коляски.
- При уходе за креслами-колясками Barry не рекомендуется использовать спиртосодержащие, абразивные чистящие средства и средства с красителями, а также проводить обработку с помощью жестких щеток.
- Перед использованием другим пациентом кресел-колясок необходимо протереть или продезинфицировать.

Ремонт, техническое и сервисное обслуживание данного Изделия могут выполняться в специализированных сервисных центрах. Актуальные адреса специализированных мастерских доступны на сайтах www.barry-care.com и www.sims2.ru

Кресла-коляски Barry можно транспортировать любыми видами транспорта с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков.

Упакованные кресла-коляски Barry должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Срок хранения

Срок хранения кресла-коляски Barry: 5 лет.

Срок службы

Кресла-коляски Barry рассчитаны на 5 лет безотказной службы при условии регулярного технического обслуживания согласно Руководству по эксплуатации, прилагаемому к каждому Изделию.

Утилизация

По истечении срока службы или порче кресла-коляски Barry, исключающих возможность ремонта, необходимо провести дезинфекцию Изделия и его утилизацию, согласно нормам СанПин 2.1.7.2790-10 и статье 23 Федерального закона «Об обращении медицинских изделий».

В случае утилизации кресел-колясок Barry пластиковые и металлические части должны быть отделены друг от друга.

Условия гарантии

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа Изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

При обнаружении брака или несоответствия Изделия, претензии принимаются уполномоченным дистрибьютором производителя в РФ - ООО «СИМС-2» по адресу:

Фактический адрес (и для доставки через курьерские и транспортные компании): г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5. Телефон: +7 (495) 792-31-90, доб. 342, 345. Режим работы: с 9.00 до 17.30 (Пн-Пт).

Адрес для отправки Почтой России: 125430, г. Москва, ул. Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18, получатель ООО «СИМС-2».

Регистрационное удостоверение: №РЗН 2016/4651 от 05.09.2016

Артикул № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное Изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Производитель: Valentine International Ltd, Тайвань (Китай).

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90

www.sims2.ru

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственность за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

Последняя редакция 09.09.2016 г.



Трость 10113

Трость - это дополнительная опора при ходьбе дома и на улице.



Подголовник для мытья головы 61016

Надувной подголовник позволяет вымыть голову в положении лежа.

Велотренажер 24397/PR

Предназначен для занятия домашним фитнесом, а также для разработки двигательной активности в процессе реабилитации.



Откидной поручень 12313

Обеспечивает безопасность и комфорт в ванной комнате и туалете, а также легко впишется в любой интерьер.

Поручни для ванной

Поручни для ванн являются страховочным элементом при перемещении людей с нарушенной координацией движений.



Защита от воды

Предназначена для защиты верхних и нижних конечностей при принятии ванны и душа.

Насадка на унитаз 10528А

За счет увеличения высоты санитарного устройства насадка на унитаз облегчает пользование туалетом людям после перенесенных травм, операций, а также инвалидам разных категорий.



Стул для ванны 10502

Стул для ванны обеспечит безопасность и комфорт при приеме водных процедур.