

medi

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2

protect. Maternity belt

Назначение

Поясничный бандаж protect.Maternity belt может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа.

Показания

- Боли в пояснице во время беременности

Противопоказания/побочные эффекты

До настоящего времени не выявлены

Принцип действия

Снижение нагрузки на переднюю брюшную стенку, таз и позвоночник при помощи фиксирующих вставок и регулируемого натяжения ремней бандажа.

Особенности

- Наличие застежек-липучек на ремнях позволяет легко надеть и снять бандаж, а также дает
- возможность его отрегулировать с учетом особенностей фигуры
- Фиксирующие вставки в поясничной области препятствуют заворачиванию материала
- Уменьшение болей в спине и пояснице за счет значительного снижения нагрузки с мышц спины
- Пояс облегает фигуру, принимая её форму
- Эффективность поддерживающей функции клинически доказана

Поместите бандаж

- Перед использованием изделие необходимо постирать.
- Поместите пояс для беременных на бедра и разместите его таким образом, чтобы фиксирующие вставки располагались по центру над бандаж отделом позвонка. Затем застегните оба конца впереди под стенкой живота (фото 1). Убедитесь, что пояс хорошо сидит и не мешает Вам ходить или сидеть.
- Просуньте кисти рук в петли с обеих сторон бандажа (фото 2) Достигнув необходимого натяжения, зафиксируйте застежки-липучки на передней поверхности бандажа.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °С с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиэстер, хлопок, полиамид, эластан, искусственная кожа

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.