

medi




## Инструкция по применению и уходу за изделием




покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.

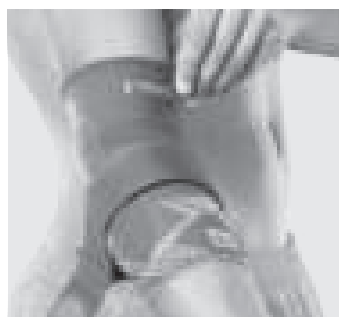

1

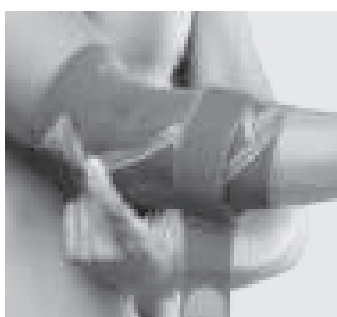

4



2



5



3



6

# Epicomed®

## Назначение

Epicomed представляет собой локтевой бандаж. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения локтевого сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

## Показания

Латеральный и медиальный эпикондилиты

- Вывих в локтевом суставе
- Выпот в суставе и его отек вследствие артрита или остеоартрита
- «Локоть теннисиста», «локоть игрока в гольф»
- Хроническое послеоперационное или посттравматическое воспаление

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены. Следует проконсультироваться у врача перед применением изделия в следующих случаях:

- Повреждения кожи в области соприкосновения с изделием, особенно в случае наличия признаков воспаления (повышенная температура, опухоль или покраснение).
- Нарушения чувствительности или кровоснабжения предплечья или кисти.
- Нарушения лимфатического оттока и опухоли мягких тканей ноги неизвестного происхождения.

Также следует проконсультироваться с доктором в случае, если Вы собираетесь комбинировать Epicomed

с другими компрессионными изделиями. В принципе, бандажи и ортезы, прилегающие к туловищу слишком плотно, могут быть причиной местного сдавления тканей, либо, что бывает значительно реже, сужения кровеносных сосудов или ущемления нервов.

## Принцип действия

Компрессионная ткань и силиконовые вкладыши массируют область сустава, улучшая кровообращение и ускоряя рассасывание отека и гематом. Дополнительный фиксирующий ремешок уменьшает мышечное и сухожильное напряжение в области надмышцелков.

Для максимального лечебного эффекта Epicomed следует носить регулярно и сочетать с физическими упражнениями. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача.

Бандаж можно использовать, находясь в воде, после чего его следует тщательно прополоскать в чистой воде и высушить на воздухе.

## Рекомендации по надеванию

- Чтобы облегчить надевание, закатайте верхний край.
- Натяните бандаж на локтевой сустав. Локтевой сгиб должен находиться посередине бандажа, в так

называемой «зоне комфорта». Шов должен проходить с обратной стороны посередине через задний костный выступ. В завершение расправьте верхний край бандажа (рис. 1–3).

- Бандаж надет правильно, если внутренний и внешний костный выступ (надмышелки) хорошо прощупываются через выемки в силиконовых вкладках (рис. 4 и 5).
- С помощью ремешка можно отрегулировать давление бандажа по собственным ощущениям (натянуть сильнее или ослабить). При необходимости ремешок легко снимается даже во время использования изделия (рис. 6).

Обратите внимание: первый раз надевать изделие следует под наблюдением квалифицированного специалиста, который прошел соответствующее обучение.

### Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Мы рекомендуем использовать мешок для белья. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала. Ополаскиватели, жиры, масла, лосьоны, мази и остатки мыла могут оказывать агрессивное влияние на материал, нарушить эффект Clima Comfort и привести к раздражению кожи.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.

- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



### Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

### Состав

Полиамид, полиэстер, эластан, мериноссовая шерсть

### Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

### Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.



### Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!