



Инструкция по эксплуатации

**LUX 585**

## **Назначение**

Табурет для ванны Ortonica Lux 585 предназначен для проведения санитарно-гигиенических процедур в ваннных комнатах.

## **Ответственность**

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.



Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте [ortonica.ru](http://ortonica.ru)

## **Указания по технике безопасности**

Рекомендуем перед началом использования стула для ванной прочитать инструкцию по эксплуатации. Для безопасной первичной эксплуатации рекомендуем прибегнуть к помощи сторонних лиц.

Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.

Не устанавливайте стул на наклонной поверхности.

Перед эксплуатацией протрите изделие теплой водой с моющими средствами.

## Распаковка и сборка

Стул для ванной упакован в картонную коробку.

### Инструкция по сборке.

1. Расположите сиденье горизонтально и установите основания ножек на раму в соответствии с рисунком (Рис.1).

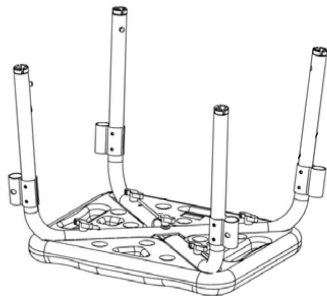


Рис. 1

2. Установите поручни с обеих сторон сиденья (Рис. 2).

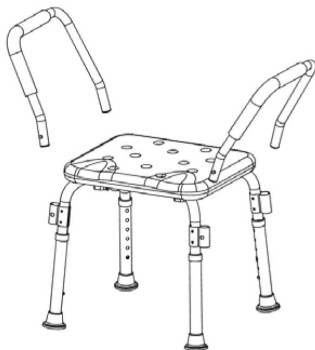


Рис. 2

3. Отрегулируйте высоту ножек и убедитесь, что все болтовые соединения туго затянуты (Рис. 3).

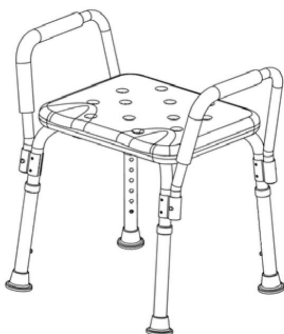


Рис. 3

# Эксплуатация стула для ванны

## Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

## Регулировки

Сиденье для ванны Lux 585 настраивается по высоте. Чтобы изменить высоту стула необходимо сжать фиксатор и установить необходимый уровень. Затем отпустить фиксатор.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

Единый сервисный центр: 8 800 707-44-52


Стул для ванны Ortonica Lux 585

Изготовлено:

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd. Китай,  
2018 год ОКПД 2 32.50.13.190

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2017/6447 от 09.11.2017 года

 8-800-500-14-14

 ortonica.ru

 vk.com/ortonica

 @ortonica