

medi

# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3

# Lumbamed<sup>®</sup> active

## Назначение

Поясничный бандаж Lumbamed active может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа..

## Показания

- Боли в пояснице, вызванные миостатической и мышечной недостаточностью
- Воспаление межпозвонковых суставов
- Заболевания связок позвоночника
- Легкая структурная недостаточность позвоночного столба, ассоциированная с дегенеративными изменениями суставов, спондилез и остеоартрит позвоночника
- Воспаление крестцово-подвздошного сочленения
- Состояние после дискэктомии

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

## Принцип действия

Lumbamed active обеспечивает поддержку позвоночника и при этом очень удобен в использовании. Бандаж значительно снижает нагрузку на поясничный отдел позвоночника и поддерживает мышцы спины, уменьшает боли в пояснице и регулирует мышечный тонус. По задней поверхности в бандаж вшиты 4 ребра жесткости, изогнутых в соответствии с анатомическими пропорциями пояснично-крестцовой области. При необходимости их можно моделировать индивидуально. Благодаря специальному составу материала, влага полностью и быстро удаляется с поверхности кожи. Даже при обильном потоотделении гарантировано комфортное состояние пациента.

## Рекомендации по применению

Если лечащий врач не порекомендовал иначе, не носите бандаж более 8 часов подряд. Возобновить использование бандажа можно после двухчасового перерыва.

## Рекомендации по надеванию

- Придерживая бандаж левой рукой за петлю на левой части бандажа, оберните его вокруг талии (рис.1).
- Прижмите левую часть бандажа к животу, правую часть расположите над левой и закрепите застежку (рис. 2). После фиксации застежки освободите сначала пальцы левой руки, затем – пальцы правой (рис. 3).
- Опустите бандаж вниз, расположив нижний край изделия чуть выше паховых складок. Всегда носите бандаж под одеждой.

## Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните бандаж. Масла, лосьоны и мази могут повредить материал.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °С с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



## Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

**Материалы**

полиэстер, полиамид, эластан,  
искусственная кожа, хлопчатобумажная  
ткань

**Гарантия**

в объемах, предусмотренных  
законодательством, действующим на  
территории страны-импортера.

**Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с  
бытовыми отходами.

**Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!