

medi




Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

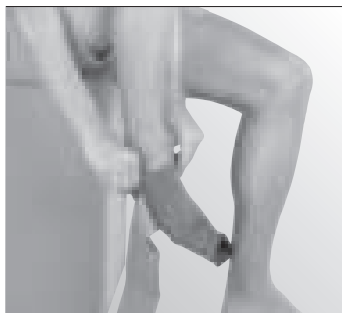

1



4



2



5



3



6

protect. Leva strap

Назначение

Бандаж на голеностопный сустав protect.Leva strap может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа.

Показания

- легкая нестабильность голеностопного сустава
- растяжение мышц и связок голеностопного сустава
- синовит и отек при артрозах и артритах
- воспаление сухожилий в области голеностопного сустава

Противопоказания

Заболевания или травмы кожи в области контакта с изделием. Нарушения чувствительности, кровообращения или лимфатического оттока в области нижних конечностей.

Принцип действия

Компрессионная ткань массирует область сустава, улучшая кровообращение и ускоряя рассасывание отека и гематом. Бандаж улучшает проприоцептивную чувствительность, за счет чего усиливается мышечная поддержка и стабилизируется голеностопный сустав

Рекомендации по надеванию (рис.

- Выверните верхнюю часть бандажа наизнанку.
- Возьмите бандаж за середину и наденьте на стопу так, чтобы пятка оказалась в правильном положении.

- Натяните и расправьте по ноге верхнюю часть бандажа.
 - Дополнительно стабилизируйте область сустава эластичной лентой, обернув ее в виде цифры «8».
- В первый раз бандаж следует надевать после инструктажа, проведенного обученным специалистом.

Рекомендации по применению

Для максимального лечебного эффекта бандаж следует носить регулярно в течение всего дня. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

Рекомендации по уходу

- Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.
- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °С с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
 - Не отбеливать.
 - Сушите на воздухе.
 - Не гладьте.
 - Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиамид, эластан, полиэстер

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.