

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3



4

Achimed

Назначение

Achimed представляет собой бандаж для ахиллова сухожилия. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения ахиллова сухожилия; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

Показания

- Острое и хроническое воспаление ахиллова сухожилия
- Воспаление после травм и операций
- Ахиллодиния
- Ахиллобурсит

Противопоказания

Окклюзии артерий, флебиты, венозные язвы, состояние после тромбоза вен. При варикозной болезни и постоянном отеке нижней конечности следует одновременно с бандажом носить медицинский компрессионный чулок до колена (A-D).

Принцип действия

- Компрессионная ткань и силиконовый вкладыш массируют область сустава, ускоряя заживление.
- Мягкий силиконовый вкладыш защищает ахиллово сухожилие.
- Съемные подпяточники уменьшают болезненное напряжение ахиллова сухожилия. По мере достижения лечебного эффекта можно (по указанию врача) иногда вынимать подпяточники, что позволит

ахиллову сухожилию адаптироваться к исходному уровню напряжения.

Рекомендации по применению

Максимальный лечебный эффект при использовании Achimed достигается в том случае, когда голеностопный сустав находится в движении. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

Рекомендации по надеванию

- Бандаж надеть правильно, если шов проходит по середине пятки, а ахиллово сухожилие располагается в вырезе силиконового вкладыша.
- Выверните верхнюю часть бандажа наружу до силиконового вкладыша (рис. 1).
 - Возьмите бандаж за середину силиконового вкладыша. Натяните бандаж на стопу так, чтобы пятка оказалась в правильном положении (вкладыш должен окружать ахиллово сухожилие) (рис. 2).
 - Разверните верхнюю часть бандажа и, по необходимости, подтяните его (рис. 3+4).

Рекомендации по уходу

- Ополаскиватели, жиры, масла, лосьоны, мази и остатки мыла могут оказывать агрессивное влияние на материал, нарушить эффект Clima Comfort и привести к раздражению кожи.
- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким

моющим средством без использования ополаскивателя.

- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, предохранять от воздействия прямого солнечного света.

Материалы

Полиамид, Полиэстер, эластан, вискоза

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!