


medi

# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.

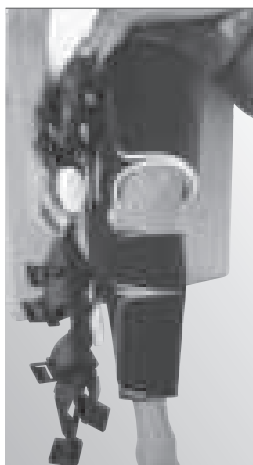

# medi ROM / medi ROM cool

## Назначение

Универсальный ортез для коленного сустава medi ROM может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения ортеза в качестве раневого покрытия.

## Показания

- Состояние после операции на коленном суставе
- Иммобилизация после повреждений коленного сустава и в период реабилитации
- Надежная стабилизация коллатеральных связок после травмы или операции

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

## Установка диапазонов сгибания/ разгибания

Для того чтобы задать диапазон движения, расположите прорезь в пластиковой крышке шарнирного механизма напротив красной кнопки – ограничителя разгибания. Нажмите на красную кнопку и, удерживая ее, установите требуемый угол разгибания. Отпустите кнопку. Повторите этот процесс для установки угла сгибания. Ограничение углов разгибания:

0°, 10°, 20°, 30°

Ограничение углов сгибания:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°

Углы ограничения движения для внутреннего и наружного шарнирных механизмов должны быть одинаковыми.

## Рекомендации по применению

- Расстегните все ремни и отсоедините шины с шарнирными механизмами от мягких подкладок.
- Туго оберните подкладки для бедра и голени вокруг ноги и зафиксируйте застежками-липучками спереди.
- Сначала прикрепите наружную шину с шарнирным механизмом на подкладку. Убедитесь, что шарнирный механизм находится на уровне надколенника и боковой оси коленного сустава.
- Таким же образом прикрепите внутренний шарнирный механизм. Проверьте, чтобы оба шарнирных механизма располагались на одном уровне.
- Вначале застегните верхний ремень на голени, затем – нижний ремень на бедре. Теперь застегните другие ремни, начиная снизу и продвигаясь вверх.
- Для снятия изделия расстегните ремни и подкладки и потяните ортез назад.

## Важные замечания

Корректируйте диапазоны сгибания и разгибания только по предписанию Вашего врача.

## Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте мягкую подкладку и покрытие предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



### **Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

### **Материалы**

алюминий, пенополиуретан, хлопок

### **Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

### **Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### **Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!