

medi




Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

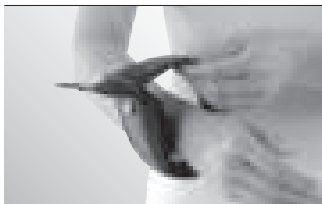

1



2



3

medi Elbow strap

Назначение

medi Elbow strap представляет собой бандаж, используемый при лечении эпикондилита. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения мест прикрепления мышц; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Эпикондилиты
- «Локоть теннисиста» или «локоть игрока в гольф»

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены

Каков механизм действия бандажа?

Компрессия сухожилия приводит к расслаблению мышцы

Как часто и когда следует применять бандаж?

Только регулярное использование гарантирует оптимальный медицинский эффект.

Как надевать бандаж?

- Расстегните ленту Поместите бандаж на предплечье приблизительно на 3 см ниже локтевого сгиба Проведите ленту через петлю, плотно зафиксируйте застежку-липучку.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Хлопок и эластан

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!