



Инструкция по эксплуатации*

XR 201

Назначение

Коленный ролятор Ortonica XR 201 предназначен для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательной системы, временной утратой двигательной активности и ампутацией конечностей домашних условиях и во время прогулок на улице. Использование ходунков улучшает координацию движений, позволяет сохранить равновесие и уменьшает нагрузку на нижние конечности.

Рама изготовлена из прочной стали, имеет высококачественное покрытие

Ролятор складывается и раскладывается без инструмента.



мягкая опора для
колена



ручной тормоз

корзина для
покупок

полиуретановые колеса

Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с данным руководством пользователя.

Показания

- Переломы, вывихи, растяжения
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания

- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.
- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.



Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ролятором
- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы - ролятор может опрокинуться.
- С осторожностью перемещайтесь по мокрым и скользким поверхностям.
- Нельзя использовать ролятор при головокружении.
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку.
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, не акцентируя внимание на роляторе.

Эксплуатация коленного ролятора

Для более комфортной эксплуатации рекомендуем отрегулировать коленный ролятор под свои потребности.

Рулевое управление регулируется по высоте (рис1). Чтобы произвести регулировку, необходимо открутить барашковый болт, установить нужный уровень и туго закрутить барашковый болт.

Чтобы отрегулировать высоту опоры для колена (рис.2), необходимо отпустить фиксатор, установить нужный уровень и закрепить фиксатор.

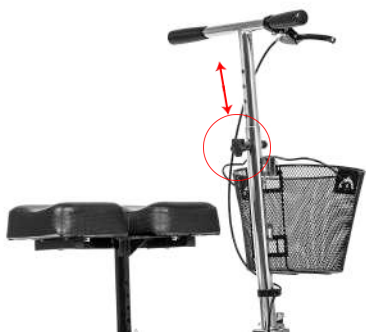


Рис. 1

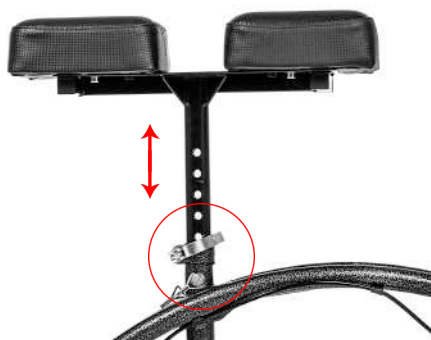


Рис.2

Технические характеристики

Параметры**	XR 201
Габариты (ДхШхВ), (± 1 см)	73x41x94
Параметры	XR 201
Диаметр колес (передние/задние), (± 1 см)	19
Грузоподъемность, ($\pm 5\%$), кг	110
Масса (нетто/брутто), ($\pm 5\%$), кг	13
Количество штук в упаковке	1

Комплектация

- Ходунки 1 шт.;
- Держатель для трости 1 шт.;
- Полукруглый упор 1 шт.;
- Руководство 1 шт.

Сведения о сертификации

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717
Производитель: «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, Guangdong, China

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи.

Импортер в России:

ООО «Медрус»

Адрес : 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: +7 (473) 300-31-91

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8-800-707-44-52

www.ortonica.ru

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

* Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных от 11.01.2019 г.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию изделий, не ухудшающие потребительские свойства.



8 800 500-14-14

ortonica.ru