

**medi**



## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3

# medi Patella tendon support

---

## Назначение

medi Patella tendon support – это бандаж для связок коленной чашечки. Данное изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения коленной чашечки; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

---

## Показания

- Пателло-фemorальный синдром
- Легкая нестабильность коленного сустава

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены

## Каков механизм действия бандажа?

Давление, оказываемое на сухожилие четырехглавой мышцы бедра, оказывает проприоцептивный эффект и таким образом усиливает мышечную поддержку коленного сустава

### **Как часто и когда следует применять бандаж?**

Только регулярное использование гарантирует оптимальный медицинский эффект.

### **Как надевать бандаж?**

- Расположите расстегнутый бандаж так, чтобы подушечка находилась под надколенником
- Протянув ленту через петлю, зафиксируйте застежку-липучку.

---

### **Рекомендации по уходу**

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



### **Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

### **Материалы**

лайкра

### **Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

### **Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### **Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!