

Трость одноопорная

TS 722



Инструкция по эксплуатации



Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

1. Назначение

Трость одноопорная Ortonica TS 722 предназначена для пользователей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Использование трости восстанавливает двигательную активность.

2. Показания к применению

- Нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Умеренные и выраженные явления гемипареза.

2. Противопоказания

Перед применением рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом.

4. Эксплуатация

Трость регулируется по высоте. Для этого необходимо сжать фиксатор и установить опору на нужный уровень. Когда фиксатор попадет в пазы, опора зафиксируется (рис. 1).



(рис. 1)



(рис. 2)

Трость оснащена встроенным устройством против скольжения (УПС) для использования при неблагоприятных погодных условиях. Для открытия УПС опустите затвор, расположенный в нижней части костыля вниз, и зафиксируйте его (рис. 2).

3. Меры предосторожности

- Будьте предельно осторожны при подъеме по ступенькам или эскалатору;
- Запрещается использовать трость с открытым УПС на каменных и твердых поверхностях, а также в помещениях;
- С осторожностью перемещайтесь по мокрым и скользким поверхностям;
- Не используйте трость при головокружении;
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, не акцентируя внимание на трости.

5. Хранение и уход

Рекомендуем хранить трость в сухом и чистом месте. Очищать раму и другие части изделия с помощью мягкой ткани с использованием мыльных моющих средств. После очистки, изделие просушить.

6. Технические характеристики

Параметры	TS 722
Высота регулируется в 10 положениях, (± 1 см)	72-95
Грузоподъемность	100
Масса (нетто/брутто), кг	0,35
Количество штук в упаковке	1

Сведения о сертификации

Трость одноопорная Dayang Medical TS 722

(вид 210110)

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2016/4718 от 15.09.2016

Производитель:

Xiamen Senyang Co., Ltd., 4-5 Floor, Xingbei Industry, No.
95-99, West 2 Road, Jiu Tianhu, Xinglin Xiamen, 361000
Fujian, China

Импортер в России: ООО «Реамед»

Адрес : 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: +7 (473) 300-31-91

Дата изготовления:

Гарантийное обслуживание

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете
обратиться по телефону: 8-800-500-14-14

www.ortonica.ru

Гарантийный срок: 1 год.

Срок службы: 3 года.

Дата продажи	Подпись и печать
	М.П.



8-800-500-14-14



vk.com/ortonica



ortonica.ru



[@ortonica](https://www.instagram.com/ortonica)

