

medi

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1




2



3



4

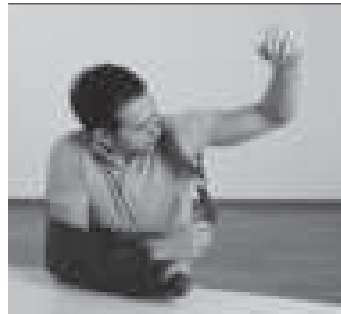

5



6

medi SAS® 15

Назначение

Отводящая шина medi SAS 15 может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения шины в качестве раневого покрытия.

Показания

- Состояние после операции на вращающей манжете плеча
- Послеоперационная иммобилизация после артроскопического удаления отложений кальция на вращающей манжете плеча и после декомпрессии субакромиального пространства (по Neer) при плечелопаточном болевом синдроме
- Консервативная или послеоперационная декомпрессия субакромиального пространства при острых или хронических бурситах
- Уменьшение напряжения компонентов капсулы плечевого сустава после открытой или артроскопической стабилизации
- Иммобилизация верхней конечности при вывихе плеча

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Важное замечание

Угол отведения можно изменять только по рекомендации врача.

Инструкция по наложению

Снятие и наложение следует, по возможности, производить на столе. При этом соблюдайте следующие рекомендации по надеванию:

застежки-липучки на передней стороне подушки, а также петли должны быть расстегнуты. Плечевой и набедренный ремни положите на стол, чтобы они были под рукой.

1. Поместите прооперированную руку в расстегнутый карман таким образом, чтобы кисть находилась на мяче (рис. 1).
2. Затем застегните все петли (рис. 2).
3. Оберните набедренный ремень вокруг тела и застегните его спереди (рис. 3).
4. Перекиньте плечевой ремень через здоровое плечо по направлению вперед и поместите руку в отверстие между плечевым и подмышечным ремнями. Теперь застегните застежку-липучку.

В целом, изделие должно применяться под руководством врача, а первое наложение – сопровождаться указаниями квалифицированного персонала, прошедшего соответствующее обучение, например, специалиста по ортопедической технике. Индивидуальная подгонка квалифицированным специалистом обеспечивает эффективность и удобство в применении. Применение одновременно с другими изделиями следует согласовать с лечащим врачом.

Рекомендации по уходу

Не носить изделие в воде. Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла, кремы или мази могут вызвать раздражение кожи и износ материала.

- Стирайте наволочки, карманы и ремни предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.

- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

пенополиуретан, полиамид

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!