

medi



Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



3



2



4

protect.Ankle lace up

Назначение

protect.Ankle lace up представляет собой ортез голеностопного сустава. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения голеностопного сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Консервативное или послеоперационное лечение повреждений связок голеностопного сустава
- Лечение растяжений
- Лечение хронической нестабильности голеностопного сустава

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Рекомендации по надеванию

- Распустите шнуровки.
 - Согните верхний конец «язычка» над шнуровкой (это позволит Вам удобнее удерживать его при натягивании изделия).
 - Возьмите изделие за заднюю пластину и за согнутый «язычок», натяните изделие на стопу как носок.
 - Если Вам трудно натягивать ортез, то надевайте его, захватив боковые отделы – это позволит Вам тянуть с большей силой.
 - Проверьте, чтобы ортез хорошо облегал область сустава, при этом лодыжки должны располагаться в углублениях, имеющих в боковых ребрах жесткости.
 - Затяните шнуровки, начиная с области пальцев стопы.
 - Изделие можно приспособить под Ваши индивидуальные потребности с помощью удаления или установки ребер жесткости.
-

Рекомендации по уходу

Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
 - Не отбеливать.
 - Сушите на воздухе.
 - Не гладьте.
 - Не подвергать химической чистке.
-



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиэстер, ПУ

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.