

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

protect.Collar soft

Назначение

protect.Collar soft представляет собой Головодержатель. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения грудного отдела позвоночника; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Болевой синдром в области шеи
- Шейный артроз
- Кривошея
- Последствия «хлыстовой травмы»
- Гипермобильность шейных позвонков
- Дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены при условии использования согласно инструкции.

Механизм действия

Стабилизация шейного отдела позвоночника с эффектом согревания и опоры. Ограничение движений.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean.
 - Не отбеливать.
 - Сушить на воздухе.
 - Не гладить.
 - Не подвергать химической чистке.
-



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Состав материала

Пенистый полиуретан, хлопок

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.