

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать
онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Инструкция по использованию

Manumed («МАНУМЕД»)

Шина для лучезапястного сустава с моделируемой пластиной.

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2011/09661

от 21 апреля 2011 года, срок действия не ограничен.

Уважаемый покупатель,

спасибо, что Вы выбрали шину Manumed. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете правила его эксплуатации.

Показания

Ревматоидный артрит.

Воспаление мягких тканей (посттравматическое, послеоперационное, хроническое) в области лучезапястного сустава.

Парез лучевого нерва.

Тендиниты и синовиты нижней трети предплечья и лучезапястного сустава.


Принцип действия

Иммобилизация лучезапястного сустава. Алюминиевая шина анатомической формы, при необходимости может быть изогнута с учетом индивидуальных особенностей.

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Инструкция по надеванию

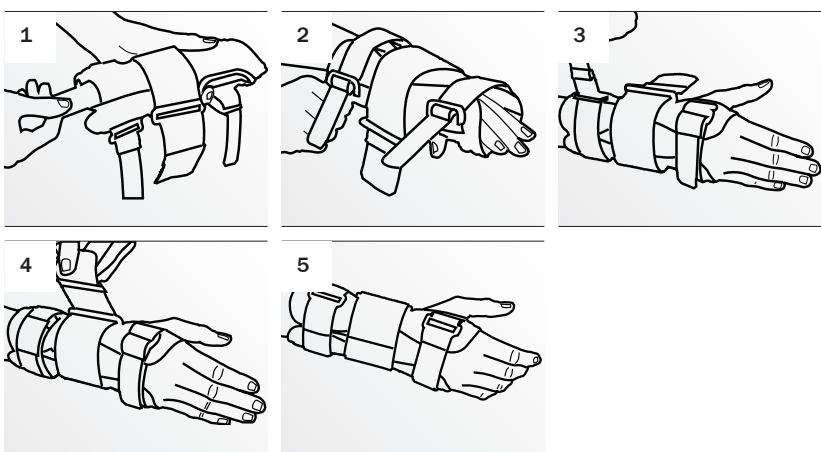

- Правильное положение шины крайне важно для оптимального функционирования: в первый раз изделие должно быть надето обученным специалистом.
- При необходимости алюминиевую шину можно вытащить и моделировать индивидуально (см. рис. 1). Моделирование шины должен осуществлять врач.
- Расстегните все ленты и наденьте изделие со вставленной алюминиевой шиной на руку (см. рис. 2).
- В первую очередь застегните узкую ленту на ладонной части шины, затем ленту на предплечье (см. рис. 3).
- Теперь застегните широкую ленту. Эта лента прикреплена к ладонной поверхности изделия при помощи липучки и может быть передвинута в нужное положение (см. рис. 4, 5).

Важная информация

Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие только согласно рекомендациям лечащего врача.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии использования изделия по назначению.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

Срок годности изделия

Срок годности не ограничен.

Инструкция по уходу

Перед стиркой извлеките алюминиевую шину. Стирайте изделие вручную в прохладной воде (30 °С) с использованием обычного мыла. Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие на воздухе. Не гладьте. Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. После использования в воде тщательно прополощите изделие и высушите на воздухе. Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов.



Состав

Тканевая основа:

полиэстер 82%, эластан 18%

Наполнитель:

полиамид, пенополиэтилен, полиэстер

Ремни и крепления:

полиэстер, полиамид, нейлон

Шина: алюминий

Инструкция по хранению

Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

Инструкция по утилизации

Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный представитель производителя в России по адресу: 121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1