

medi


Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

Version rechts/right

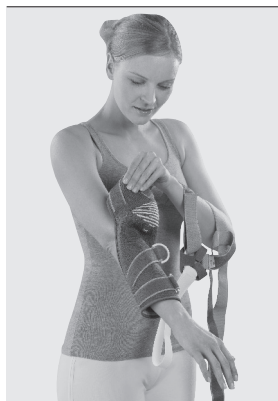


1



4



7

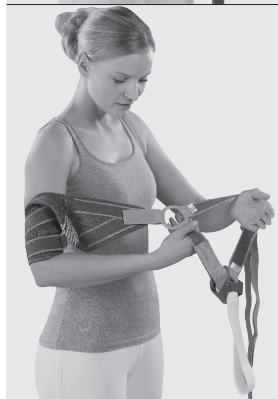


2



5



6

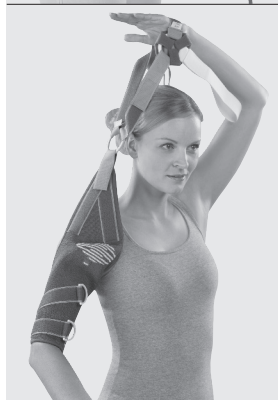

3



6

Version links/left



1



4



7




2



5



6

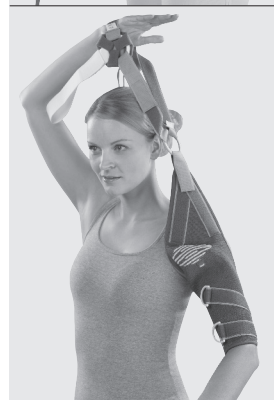

3



6

Omomed®

Назначение

Omomed представляет собой Плечевой бандаж. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения плеча; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

Показания

- Консервативное и послеоперационное лечение проксимальных переломов головки плечевой кости, лопатки, а также повреждений гленоидальной ямки
- Консервативное лечение остеоартрита плечевого сустава, сопровождающегося болями
- Восстановительное лечение после установки протеза плечевого сустава
- Консервативное лечение острого и хронического вывихов плеча
- После операции стабилизации плечевого сустава
- После реконструкции поврежденной вращающей манжеты плеча и рефиксации сухожилия бицепса (SLAP-повреждения)

Противопоказания

Консервативное и послеоперационное лечение задних вывихов плеча.

Принцип действия

Эластичная ткань бандажа оказывает местное давление на поверхностно расположенные мягкие ткани в области плеча и плечевого сустава, тем самым, снижая мышечное напряжение, уменьшая отек и препятствуя его образованию. Бандаж

ограничивает и предотвращает опасные движения сустава благодаря регулируемому ограничению наружной ротации, отведения и сгибания. Изделие снижает тонус мышц, окружающих сустав, восполняет поструральную недостаточность плеча за счет фиксации головки плеча в гленоидальной ямке, уменьшает боли в плече.

Рекомендации по применению

Для максимального лечебного эффекта Omomed следует носить регулярно. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

Рекомендации по надеванию

- Наденьте манжету для верхних отделов плеча на пораженную руку (рис. 1).
- Проденьте другую руку через треугольник в системе ремней (рис. 2).
- Перекиньте застегнутую ленту назад за голову и удостоверьтесь, что манжета для плеча и треугольник из ремней хорошо прилегают к поверхности тела (рис. 3-5).
- Соедините под грудью два ремня, которые крестообразно пересекаются в подмышечной области на здоровой стороне. Для этого проведите длинный ремень вокруг спины и пристегните к нему короткий ремень. Жесткая часть застежки-липучки должна быть обращена к телу (рис. 6).
- Пропустите белый ремень на груди (присоединенный к нагрудному кольцу) через одно из белых колец на манжете (согласно указаниям врача), а затем закрепите конец ремня с помощью застежки-липучки (рис. 7).
- Осуществите окончательную подгонку манжеты и всех ремней

для обеспечения комфорта при условии надежного ограничения движений.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °С с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Рекомендации по хранению

Храните изделие в сухом месте при комнатной температуре.

Предохраняйте от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.

Состав

Полиамид, полиэстер, эластан

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Важные замечания

Изделие предназначено только для индивидуального использования. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии

производителя утрачивают силу. Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача. Не носите изделие при наличии открытых ран. Применяйте изделие только согласно рекомендации Вашего врача.

Компания medi желает Вам скорейшего выздоровления!