

medi

Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

circaid® single band ankle foot wrap

Предназначение

circaid single band ankle foot wrap (afw) - компрессионный бандаж многоразового индивидуального использования, предназначенный для лечения пациентов с венозными и лимфатическими нарушениями. Компрессионный бандаж предназначен для обеспечения компрессии в области стопы и лодыжки.

Показания

- Лимфедема
- Другие формы отеков:
 - Венозные
 - Посттравматические
 - Послеоперационные
- Лимфедема
- Варикозная болезнь(всех типов)
- Хроническая венозная недостаточность (ХВН)
- Венозный стаз
- Несостоятельность венозных клапанов
- Посттромботический синдром
- Трофические венозные язвы
- Ангиодисплазия
- Состояния после

склеротерапии

- Профилактика тромбозов
- Венозная экзема
- Липодерматосклероз

Относительные противопоказания

В соответствии с существующими противопоказаниями, лечащий врач оценивает состояние пациента и соотносит потенциальную пользу от применения данного компрессионного изделия (например, при хронической венозной недостаточности) с возможными рисками

терапевтического применения данного медицинского изделия.

- Нарушение или отсутствие чувствительности нижних конечностей.
- Аллергические реакции на компоненты компрессионного изделия.

Абсолютные противопоказания

Состояния, при которых использование компрессионных изделий абсолютно исключено, несмотря на наличие показаний (например, хроническая венозная недостаточность).

- Хронические облитерирующие

заболевания артерий нижних конечностей средней и тяжелой степени

- Декомпенсированная сердечная недостаточность
- Септический флебит
- Синий болевой флебит
- Инфекция области голеностопного сустава и/или стопы.

Хранение



Хранить в сухом месте



Беречь от солнечного света

Гарантийный срок реализации в виде символа песочных часов и обозначения даты «месяц-год» указан на наклейке изготовителя, расположенной на упаковке изделия. Изготовленные по индивидуальному заказу изделия являются товаром для немедленного использования и гарантийный срок реализации на них не указывается.

Срок эксплуатации

Изделие circaid single band ankle foot wrap имеет срок эксплуатации при ежедневном использовании не более 3 месяцев.

Ввиду износа материала медицинская эффективность стандартных и изготовленных по индивидуальному заказам изделий может быть гарантирована только на указанные сроки эксплуатации при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в настоящей инструкции по использованию.

Комплектация упаковки

Изделие circaid single band ankle foot wrap (1шт)

Утилизация



Утилизировать с бытовыми отходами. К медицинским компрессионным изделиям не применяются специальные требования по утилизации.

CE

Маркировка CE ставится на все серийные изделия и подтверждает соответствие Директиве ЕС 93/42/ЕЕС. На основании Директивы ЕС 93/42/ЕЕС маркировка CE не ставится на изделия, изготовленные по индивидуальному меркам по требованию заказчика. Такие изделия соответствуют

основным требованиям Приложения I Директивы.

Состав материала

circaid single band ankle foot wrap:
50% Нейлон
50% Эластан



Данное изделие не содержит латекс.

Рекомендации по стирке

Изделие можно стирать в машине, используя деликатный режим и сушить при невысокой

температуре. При этом во избежание налипания ворса на застежки-липучки и повреждения другой одежды рекомендуется помещать изделие в защитную сетку. Чтобы продлить срок службы изделия, его следует стирать вручную и сушить, не отжимая.



Машинная стирка, в теплой воде



Не отбеливать



Сушить в сушильной машине при невысокой температуре



Не гладить



Не применять химчистку



Не отжимать

Надевание

Прежде чем надевать изделие circaid single band ankle foot wrap, наденьте носок. Данное изделие нельзя надевать

непосредственно на кожу.

Шаг 1. Поместите оснащенный застежкой-липучкой край изделия circaid single band ankle foot wrap на тыльную часть стопы. Удерживая застежку-липучку на месте, оберните ленту вокруг стопы один раз и закрепите застежку-липучку.

Шаг 2. Продолжайте оборачивать лентой circaid single band ankle foot wrap стопу, обеспечивая достаточно сильную и комфортную компрессию. Покройте стопу от основания пальцев к пятке,

позаботившись о том, чтобы не было пространств между слоями эластичного материала. На целевые проблемные области по желанию наложите двойные слои ленты.

Шаг 3. При надевании в первый раз можно укоротить ленту, если это необходимо. Закрепите край изделия circaid single band ankle foot wrap, используя одну из предоставленных застежек-липучек.

Примечание.

В случае малейшей боли немедленно снимите изделие и проконсультируйтесь с врачом.

При использовании изделия, оно никогда не должно причинять боль. Должно быть ощущение надежности и комфорта. Если при использовании изделия давление увеличивается или уменьшается, корректируйте изделие по мере необходимости.

Снятие

Открепите застежку-липучку и снимите ее с изделия circaid single band ankle foot wrap. Разбинтуйте ногу и сверните изделие в рулон, чтобы подготовить его к следующему использованию. Убедитесь, что застежка-липучка находится на конце рулона.