

medi

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



Abb. 1

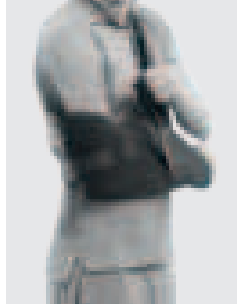


Abb. 4



Abb. 2



Abb. 5



Abb. 3

medi Armschlinge

Назначение

Отводящая шина medi Armschlinge может быть использована только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения шины в качестве раневого покрытия.

Показания

- Иммобилизация после операций на плечевом суставе и плече
- Вывих плеча

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены. Следует проконсультироваться у врача перед применением изделия в следующих случаях:

- Повреждения кожи в области соприкосновения с изделием, особенно в случае наличия признаков воспаления (повышенная температура, опухоль или покраснение).
- Нарушения чувствительности или кровоснабжения предплечья или кисти.
- При необходимости совместного применения с компрессионным рукавом Вам следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Рекомендации по использованию

Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача.

Рекомендации по надеванию

- Расстегните застёжки-липучки и положите руку в поддерживающую часть биндажа. рис. 1
- Протяните плечевой ремень за спиной, перекиньте через здоровое плечо и зафиксируйте застёжкой-липучкой на поддерживающей части биндажа. рис. 2+3
- Оберните поясной ремень вокруг тела и зафиксируйте застёжкой-липучкой на поддерживающей части биндажа. рис. 4

Поддерживающая часть биндажа индивидуально моделируется под необходимую длину предплечья при помощи застёжки-липучки. рис. 5

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжку-липучку. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Состав

Хлопок, полиамид

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!