

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Инструкция по использованию

medi Epico ROMs («МЕДИ ЭПИКО РОМЗ»)

Ортез локтевой жесткий регулируемый с шарниром
Регистрационное удостоверение № ФЗС 2011/09662
от 21 апреля 2011, срок действия не ограничен.

Уважаемый покупатель,

спасибо, что Вы выбрали ортез medi Epico ROMs. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете правила его эксплуатации.

Показания

Консервативное лечение нестабильности локтевого сустава как изолированной, так и в сочетании с другими повреждениями.
Переломы медиального или латерального надмыщелков плеча.
Иммобилизация после эндопротезирования.
Послеоперационный период при стабилизации локтевого сустава.
Функциональное лечение стабильных переломов костей предплечья.
Пассивная мобилизация после артролиза локтевого сустава.
Пластика связок локтевого сустава.

Принцип действия


Иммобилизация локтевого сустава с возможностью этапного изменения амплитуды движений от 0° до 120°

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

ВНИМАНИЕ! Туго затянутые ремни могут стать причиной нарушения оттока лимфы. Для профилактики застойных явлений следует периодически ослаблять ремни.

Инструкция по надеванию

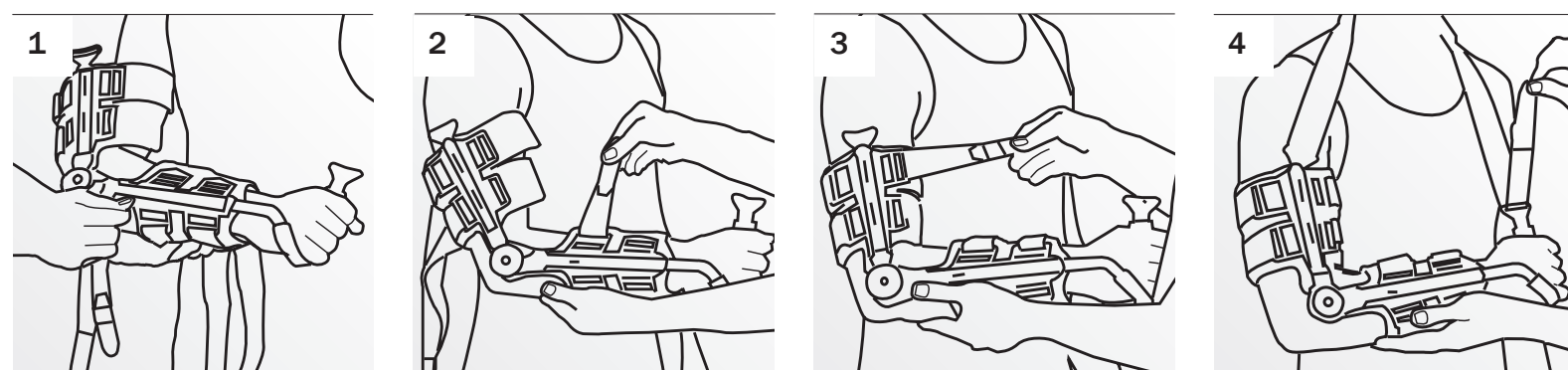

- Отстегните все застежки-липучки и наденьте ортез так, чтобы шарнир находился непосредственно над латеральным надмыщелком. Длину опоры для кисти можно регулировать с помощью двух винтов на металлической шине.
- Застегните сначала два ремня на предплечье (см. рис. 1 и 2), а затем оба плечевых ремня (см. рис. 3).
- Проденьте один конец плечевого ремня через кольцо на манжете для плеча и застегните застежку-липучку.
- Перекиньте другой конец ремня через плечо, проденьте его через кольцо на держателе кисти и застегните застежку-липучку (см. рис. 4).

Ограничение сгибания и разгибания

Изначально ортез зафиксирован под углом 0°. Для изменения угла сгибания/разгибания необходимо нажать соответствующую кнопку и передвинуть рычаг на нужную отметку. Сначала меняйте угол сгибания, затем – разгибания.
Диапазон ограничения сгибания: 0° – 120°.
Диапазон ограничения разгибания: 0° – 120°.

Важная информация

Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие только согласно рекомендациям лечащего врача.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии использования изделия по назначению.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

Срок годности изделия

Срок годности не ограничен.

Инструкция по уходу

Перед стиркой отделите металлическую шину от тканевых элементов. Мягкие части ортеза стирайте вручную в прохладной воде (30 °С) с использованием обычного мыла. Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие на воздухе. Не гладьте. Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. После использования в воде тщательно прополощите изделие и высушите на воздухе. Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов.



Состав

Тканевая основа:
полиэстер 82%, эластан 18%
Наполнитель:
полиамид, пенополиэтилен, полиэстер
Ремни и крепления:
полиэстер, полиамид, полиуретан
Рама: алюминий
Шарнир: сталь

Цвет

Голубой (blue)

Инструкция по хранению

Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

Инструкция по утилизации

Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный представитель производителя в России по адресу:
121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1