



**Инструкция по эксплуатации**  
**Опора под спину**  
**HR 3000**



Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

## **1. Назначение**

Опора под спину Ortonica HR 3000 предназначена для ухода за инвалидами и лежачими больными. Она устанавливается на кровать, обеспечивая поддержку тела пациента.

Рама выполнена из прочной стали, покрыта полимерно-порошковым покрытием. Сетчатый материал дает необходимую упругость и обладает умеренной жесткостью. Мягкий подголовник обеспечивает комфорт шейно-воротниковой зоне.

## **2. Показания к применению**

- Нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
- Реабилитация после операций, травм, переломов конечностей;
- Болезни системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения.

## **3. Противопоказания**

Перед применением рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом.

## **4. Меры предосторожности**

- При использовании опоры под спину рекомендуем воспользоваться сторонней помощью;
- При регулировке опоры под спину по углу наклона возможна опасность защемления пальцев;
- Не переносите вес тела на одну сторону рамы - опора может опрокинуться.

## 5. Эксплуатация

- 1.Разложите раму.
- 2.Внимательно осмотрите опору под спину, убедитесь в целостности соединительных узлов;
- 3.Установите опору под спину на кровать;
- 4.При необходимости отрегулируйте угол наклона.

## 6. Хранение и уход

Рекомендуем хранить опору под спину в сухом, чистом месте. Конструкция компактно складывается, поэтому не занимает много места. Очищать опору под спину мягкой тканью с использованием мыльных моющих средств.

## 7. Комплектация

- Опора под спину -1 шт;
- Инструкция по эксплуатации - 1шт.

## 8. Технические характеристики

Рама	Сталь с полимерно-порошковым покрытием
Цвет	Белый
Спинка	Текстиль
Угол наклона	0-75°
Вес, кг	3
Длина изголовья (см)	68
Ширина (см)	58
Упор для изменения угла наклона спинки, шт	2
Макс. нагрузка на край, кг	100

## Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи.

Срок хранения не ограничен.

Быстроизнашиваемые детали гарантийному обслуживанию не подлежат.

Производитель: ООО "Ортоника", Россия,  
105554, Москва, ул. Парковая 11-я, д.9/35, кв. 94

Место производства:

ООО "Ортоника", Россия, 394026,  
г. Воронеж, ул. Московский проспект, д.11

Тел: 8-800-500-14-14

[www.ortonica.ru](http://www.ortonica.ru)

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться  
по телефону: 8-800-500-14-14

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика
	М.П.