

medi

# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



4



2



5



3

# medi PTS

---

## Назначение

medi PTS представляет собой ортез для иммобилизации колена. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения колена; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

---

## Показания

- Консервативное лечение разрывов задней крестообразной связки на ранних стадиях
- Иммобилизация после реконструктивных операций на задней крестообразной связке
- Консервативное лечение хронической нестабильности задней крестообразной связки
- Дефицит разгибания в коленном суставе из-за укорочения задней стенки капсулы сустава
- Пателлофеморальный болевой синдром, не поддающийся лечению
- Острая боль в передней части колена

## Противопоказания

- Тромбоз глубоких вен голени и бедра
- Изолированный разрыв или нестабильность передней крестообразной связки

## Особые замечания

Иногда, в первые несколько часов использования шины, боли в ноге могут усилиться. Если болевые ощущения не уменьшились в течение 24 часов, следует сообщить об этом Вашему врачу. Консультация врача может понадобиться Вам при возникновении внезапной боли, отека, нарушений чувствительности, при ощущении холода в стопе и

посинении пальцев. В этом случае уменьшите натяжение фиксирующих лент и держите ногу неподвижно до тех пор, пока не получите дальнейшие указания Вашего врача.

## Рекомендации по надеванию

- Закрепите поддерживающую вставку для голени, чтобы ее верхний край находился на одном уровне со специальной отметкой на шине. Нижний конец вставки (в виде раздвоенного язычка) должен располагаться над верхними краями лодыжек. В случае если вставка слишком длинная, подрежьте ее верхний край. Внимание: верхний край вставки для голени не должен располагаться выше отметки на шине!
  - Расположите задние ребра жесткости шины по центру задней поверхности ноги. Боковые ребра жесткости при необходимости можно изогнуть.
  - Оберните боковые части шины вокруг ноги таким образом, чтобы коленная чашечка осталась открытой. Для обеспечения правильного положения шины на ноге длину окружности изделия можно уменьшить или увеличить за счет изменения положения внутренних частей.
  - В первую очередь закрепите фиксирующие ленты на бедре, затем – на голени. Еще раз затяните ленту над коленом.
- 

## Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки и удалите шарнирные шины. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.

- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



### **Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

### **Материалы**

Алюминий, хлопок, ПУ, ПЭ

### **Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

### **Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.