

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



medi compression

Умная и эффективная продукция

Более 60 лет исследований и совместной творческой работы врачей, инженеров, технологов и дизайнеров компании medi по совершенствованию компрессионных изделий позволили создать и внедрить в производство комплекс уникальных инновационных технологий, объединенных под товарным знаком компании – medi compression. Медицинские компрессионные изделия, производимые по этим технологиям, гарантируют правильное с медицинской точки зрения распределение давления и исключительные потребительские свойства.

medi compression – ключ к успеху в компрессионном лечении, к хорошему самочувствию в повседневной жизни и спорте.
Сделано в Германии.

medi travel women

Компрессионные гольфы для путешествий с гладкой текстурой.

medi travel men

Компрессионные гольфы для путешествий с рифленой текстурой.

Путешествуйте с комфортом,
возвращайтесь отдохнувшими!

Во время длительных путешествий на кровеносную систему действует целый ряд негативных факторов. Низкая влажность воздуха в салоне самолета способствует обезвоживанию организма и повышению вязкости крови. Пониженное атмосферное

давление и длительное пребывание в сидячем положении значительно замедляют венозный кровоток и, как следствие, вызывают развитие застоя крови в венах ног. В результате этих процессов создаются условия для образования в просвете вен кровяных сгустков (тромбов), что может привести к развитию серьезных и даже смертельно опасных осложнений. Например таких, как тромбоз – полная закупорка просвета вены тромбом или тромбозом легочной артерии – закупорка легочной артерии оторвавшимся тромбом. В зоне риска находятся все пассажиры, но особенно высокому риску развития тромбоза подвержены люди с уже имеющейся патологией вен нижних конечностей.

Принцип действия и преимущества

Компрессионные гольфы medi travel оказывают на вены голени давление с физиологически правильным градиентом. В результате диаметр вен уменьшается, что ведет к увеличению скорости венозного кровотока и снижению риска образования тромбов.

Компрессионные технологии medi

Способность трикотажа растягиваться в продольном и поперечном направлениях (запатентованная технология **Perfect Fit**) позволяет добиться правильного распределения изделия по ноге без образования складок и неприятных ощущений.

Clima Comfort – запатентованная технология вязки из уникальных дышащих материалов обеспечивает оптимальный водный и температурный баланс кожи в любое время года.

Зapatентованная технология **Clima Fresh** обеспечивает антимикробный эффект и препятствует образованию неприятного запаха.

Состав материала

medi travel women	75% полиамид 25% эластан
-------------------	-----------------------------

medi travel men	90% полиамид 10% эластан
-----------------	-----------------------------

Не содержит латекс



Изделия не содержат натуральный каучуковый латекс, получаемый из млечного сока каучуконосных растений.

Рекомендации по уходу

Первый раз стирайте Ваше компрессионное изделие отдельно от другого белья. Компрессионный трикотаж следует стирать ежедневно вручную или в стиральной машине (40 °C) в деликатном режиме. Используйте моющие средства для цветного белья, не содержащие отбеливатели и кондиционеры. После стирки многократно прополощите компрессионное изделие, аккуратно отожмите руками или в стиральной машине, используя деликатный режим, и повесьте сушиться в хорошо проветриваемом месте. Не оставляйте влажные компрессионные изделия лежать на полотенце или под прямыми солнечными лучами. Не сушите компрессионный трикотаж на отопительной батарее, не подвергайте химической чистке.



Особые указания

Никогда не подворачивайте верхний край изделия: это приводит к локальному повышению давления (так называемому эффекту жгута), ухудшению кровотока и неприятным ощущениям. Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, чтобы компрессионные гольфы лучше скользили по коже. Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти или если Вы носите кольца. Чтобы избежать повреждений при надевании компрессионного трикотажа, целесообразно использовать резиновые перчатки. Шершавая и ороговевшая кожа на пятках может быть причиной повреждения трикотажа, так как в процессе надевания пятка должна скользить через узкую часть изделия. Пожалуйста, следите за тем, чтобы внутренняя поверхность Вашей обуви была в хорошем состоянии, так как ее дефекты могут привести к повреждению изделия. Компрессионный трикотаж medi устойчив к различным мазям, кремами увлажнителям кожи, однако некоторые их комбинации со временем могут привести к снижению прочности изделия. В связи с особенностями технологии круговой вязки, с изнаночной стороны изделий неизбежно присутствуют свободные остатки нитей (компрессионных из эластана и/или вязальных из полиамида), невидимые с внешней стороны и предотвращающие образование спущенных петель и «стрелок». Как правило, эти остатки нитей при использовании изделий не ощущаются и не доставляют неудобств. В случае, если Вы все же ощущаете эти нити, допускается их немного укоротить ножницами. Ни в коем случае не следует тянуть за эти нити, их отрывать или удалять полностью. При укорачивании нити важно помнить следующее: свободный остаток

вязальной нити должен быть не менее 2-3 мм, а свободный остаток компрессионной нити должен быть не менее 5-7 мм. Не допускается укорачивать нить в ее натянутом состоянии! Консультанты специализированных салонов дадут Вам рекомендации, как правильно надевать и снимать компрессионное изделие и ухаживать за ним. Пожалуйста, следуйте этим рекомендациям.

Противопоказания

Абсолютные

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, когда регионарное систолическое давление на a. tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст. Тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии. Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность. Трофические язвы невенной этиологии. Острая инфекция мягких тканей. Септический флебит. Индивидуальная непереносимость материала.


Относительные

Нарушение чувствительности.

Компания medi не несет ответственности за использование компрессионного трикотажа при наличии вышеперечисленных противопоказаний.

Рекомендации по подбору размера

Размер изделия подбирается строго по индивидуальным анатомическим меркам конечности.

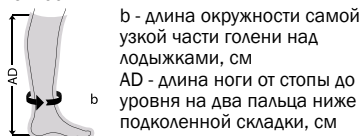

b - длина окружности самой узкой части голени над лодыжками, см

AD - длина ноги от стопы до уровня на два пальца ниже подколенной складки, см

Для определения размера и длины гольфов необходимо руководствоваться таблицей на обратной стороне упаковки изделия.

Рекомендации по надеванию

Выверните изделие наизнанку до той части, которая надевается на стопу. Наденьте изделие на стопу. Обратите внимание на правильное расположения пяточной части. Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по ноге. Убедитесь в том, что изделие не образует складок и не вызывает сдавливания. Никогда не подворачивайте верхний край изделия. Это приводит к локальному повышению давления, ухудшению кровотока и неприятным ощущениям (см. также рисунки в начале международной инструкции по использованию).

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

8-800-250-39-37

Служба информации medi в России

(495) 921-39-37 www.medirus.ru