

medi

Инструкция по применению и уходу за изделием




покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1

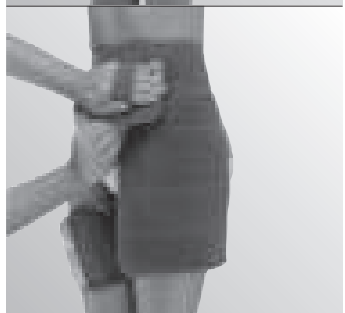

2



3



4

medi orthosox

Назначение

Изделие medi orthosox – Бандаж на тазобедренный сустав.

Его необходимо применять исключительно для ортезного лечения тазобедренного сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

Бандаж создает циркулярную компрессию в области операционного вмешательства и предохраняет тазобедренный сустав от нежелательных движений.

Таким образом, бандаж ограничивает произвольные и неконтролируемые движения в тазобедренном суставе и обеспечивает высокий уровень безопасности при необходимости мобилизации тазобедренного сустава.

Использование бандажа medi orthosox облегчает реализацию компрессионной терапии в области тазобедренного сустава на этапе внутрибольничной реабилитации, что позволяет сократить время послеоперационного пребывания в больнице.

Показания

Необходимость компрессионной терапии и ограничения внешней ротации бедра после:

- межвертельной корригирующей остеотомии;
- остеосинтеза бедра при подвертельных переломах;

- тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.

Относительные противопоказания

- артериальная недостаточность;
- выраженная деформация нижних конечностей;
- гангренозный некроз.

Важная информация

В силу выраженного компрессионного эффекта в проекции большого вертела необходим динамический мониторинг кровоснабжения в данной области.

Инструкция по надеванию

- Оберните изделие вокруг таза и бедра (рис. 1).
- Натяните тазовую часть на область таза с учетом ощущений пациента и зафиксируйте с помощью застежки-липучки (рис. 2).
- Натяните бедренную часть на проксимальную часть бедра и зафиксируйте с помощью застежки-липучки. С этого момента компрессионный эффект бандажа нейтрализует тоническое напряжение мышц, вращающих бедро кнаружи (рис. 3).
- При необходимости пациент может сам отрегулировать степень натяжения ткани бандажа, зафиксировав застежку-липучку в новом положении (рис. 4)

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушить на воздухе.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиамид, полиэстер, эластан

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!