



Инструкция по эксплуатации*

XR 203

Назначение

Ходунки-ролляторы с опорой под грудь Ortonica XR 203 предназначены для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательной системы и пожилых людей в домашних условиях и во время прогулок на улице. Использование ходунков улучшает координацию движений, позволяет сохранить равновесие и уменьшает нагрузку на нижние конечности.

Ходунки изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, имеют высококачественное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.

XR 203 оснащены мягким упором под грудь, мягким сиденьем и кронштейном для сумок.



Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с данным руководством пользователя.

Показания

- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы.
- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания

- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.
- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.



Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками.
- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться.
- С осторожностью перемещайтесь по мокрым и скользким поверхностям.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
- Нельзя использовать ходунки при головокружении.
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку.
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, не акцентируя внимание на ходунках.

Технические характеристики

Параметры**	XR 203
Габариты (ДхШхВ), (± 1 см)	60x57x107-132
Ширина между ручками, (± 1 см)	24,5
Размер сиденья, (± 1 см)	55x21
Грузоподъемность, ($\pm 5\%$), кг	110
Масса (нетто/брутто), ($\pm 5\%$), кг	10,5
Количество штук в упаковке	1

Комплектация

- Ходунки 1 шт.;
- Держатель для трости 1 шт.;
- Полукруглый упор 1 шт.;
- Руководство 1 шт.

Подготовка к эксплуатации

1. Разложите раму.
2. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоз.
3. установите сиденье.
4. Отрегулируйте высоту упора под грудь.

Сведения о сертификации

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717
Производитель: «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, Guangdong, China

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи.

Импортер в России:

ООО «Медрус»

Адрес : 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: +7 (473) 300-31-91

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8-800-707-44-52

www.ortonica.ru

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

* Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных от 11.05.2018 г.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию изделий, не ухудшающие потребительские свойства.



8 800 500-14-14

ortonica.ru